

QUICK GUIDE TIL CROSS / CROSS XL

1. SÆDEBREDDE

CROSS (Maks. brugervægt 125 kg)
 35,0 cm 37,5 cm 40,0 cm 42,5 cm
 45,0 cm 47,5 cm 50,0 cm

CROSS XL (Maks. brugervægt 155 kg)
 47,5 cm 50,0 cm 52,5 cm 55,0 cm 57,5 cm 60,0 cm

2. SÆDEDYBDE


Kort model: 37 - 47 cm
 Lang model: 43 - 53 cm

Kort model anbefales ved
 sædedybde 47 cm og derunder

3. SÆDEHØJDE


Cross **Lav** model (Ofte gå-stol)

Drivhjul Sædehøjde bagtil		Forhjul Sædehøjde fortil		
22"	Pos.	5" / 125 mm	6½" / 165 mm	7" / 175 mm
38,5 cm	C	Trinløst 38-45 cm Standard 39 cm	Trinløst 41-47 cm	Trinløst 43-47,5 cm
43,0 cm	B			
47,5 cm	A			

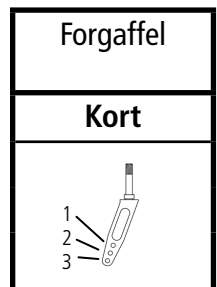


Cross **Høj** model (Ofte med fødder på benstøtter)

Drivhjul Sædehøjde bagtil		Forhjul Sædehøjde fortil		
24"	Pos.	5" / 125 mm	6½" / 165 mm	7" / 175 mm
41,0 cm	C	Trinløst 42,5-49,5 cm	Trinløst 44,5-51,5 cm Standard 46 cm	Trinløst 45-52 cm
45,5 cm	B			
50,0 cm	A			

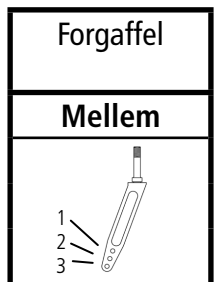

Indstilling af Drivhjul:

- Højden ændres ved at flytte drivhjulet op/ned
- Balance ændres ved at flytte drivhjulet frem/tilbage
 Pos.1 = meget aktiv stol / Pos.4 = meget stabil stol
- Møtrikken på indersiden af stolen afmonteres (24mm nøgle)
- Begge "alubrikker" flyttes til ny position (brikken skal vendes så den passer ind i stellet)
- Akselhylsteret isættes, så det låser sig selv
- Spændeskive og møtrik monteres igen

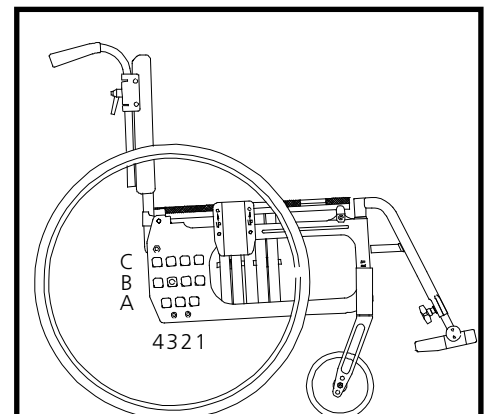


Sædeenheden er som standard
 kippet 3° bagover



Indstilling af Cross / Cross XL


1. Indstilling af sædevinkel og sædehøjde fortil:

- * De 2 bolte ved forgaffelhuset løsnes i begge sider med en 6mm unbrakonøgle
- * Find korrekt højde og vinkel
- * Spænd den øverste bolt i begge sider
- * Placer forhjulshusene i vatter
- * Spænd den nederste bolt i begge sider

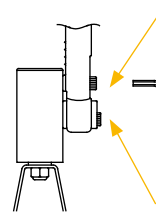


2. Indstilling af sædedybde:

- * Sædedybden kan indstilles 0 - 10 cm ved at løfte det forreste sædebetræk og skubbe det bagud/fremad. Sædedybden påvirkes også af rygbetrækkets indstilling

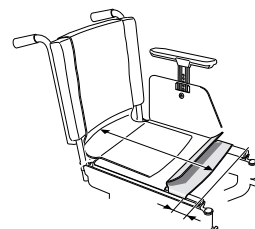



3. Indstilling af rygvinkel: Trinløs justerbar 5° forover til 15° bagover:

- Juster et rygrør ad gangen (kan gøres med bruger i stolen)
- * Bolten på indersiden af ryglænsbeslaget løsnes med 13 mm nøgle
 - * Indstil den ønskede vinkel ved at justere skubbehåndtaget
 - * Bolten spændes

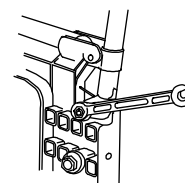

4. Indstilling af ryghøjde: Trinløs justerbar 30 til 45 cm:

- (kan gøres med bruger i stolen)
- * Bolten på indersiden af rygrøret løsnes 2 - 3 omgange med 5 mm unbrakonøgle
 - * Juster højden ved at trække ryglænen op eller ned efter målebånd
 - * Bolten spændes fast igen
 - * Sørg for at begge sider er i samme højde ved at kontrollere målet på målebåndet på bagsiden af rygrøret

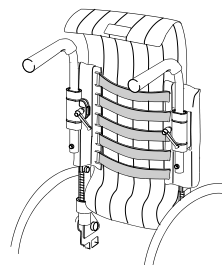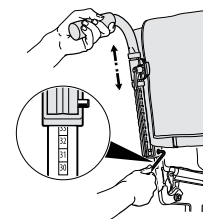


5. Indstilling af velcro ryg:

- * Alle velcrobånd løsnes
- * Bånd på øverste del af bækken strammes til
- * Øvrige bånd spændes løst


6. Vinkling af fodplade:

- * Begge bolte løsnes 1/2 - 3/4 omgang med 5 mm unbrakonøgle
- * Fodpladen vinkles og begge bolte spændes

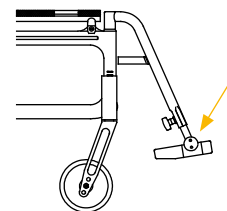

7. Indstilling af armlænsenhøjde:

- * Afmonter bolt og møtrik med 3 mm unbrakonøgle
- * Træk armlænen op eller ned til ønsket højde
- * Monter boltene igen

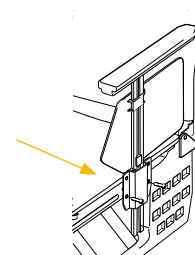

Ved at flytte armlænsbeslaget kan højden justeres yderligere:

- * Boltene løsnes med 5 mm unbrakonøgle
- * Monteres i det andet hul