
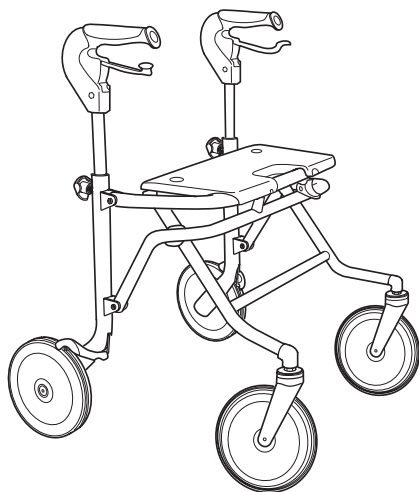





DOLOMITE MELODY, SOPRANO


Anvend ikke kørestol eller rollatoren som
persontransport.



DOLOMITE MELODY
Brugervægt max 135 kg

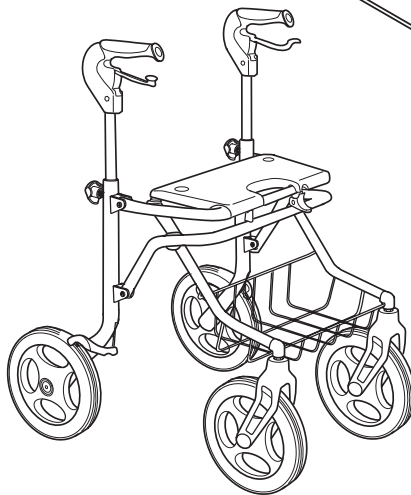

DOLOMITE SOPRANO
Brugervægt max 160 kg



BRUGSANVISNING

Læs denne brugsanvisning grundigt før ibrugtagning.

Rollatorerne kan anvendes til både indendørs- og udendørsbrug.

SIKKERHED

- Det er ikke tilladt at stå på rollatoren samt at anvende den til persontransport.
- Sid aldrig på rollatoren og spark dig frem med fødderne.
- Når du sidder på rollatoren, skal begge bremser være i parkeringsstilling.
- Parkeringsbremserne skal være i bremsetilling, når rollatoren bruges som støtte, når man rejser sig op fra f.eks. en stol.
- Rollatoren skal være helt foldet ud og låst, når du går med den. NB! Må kun bruges som gangstøtte.
- Udvis forsigtighed ved gang på skråt underlag.
- Gå ikke op og ned ad trapper med rollatoren.
- Brug ikke rollatoren på rulletrapper.
- Vær forsigtig når kurven er tungt lastet. Max kurv last: 7 kg for **DOLOMITE MELODY S**, 10 kg **DOLOMITE MELODY M, L** og max 12 kg for **DOLOMITE SOPRANO**.

OBS! Transport af div. last/genstande skal placeres i kurven eller på bakken (**DOLOMITE SOPRANO**). OBS! Kontrollér, at spærren/udklapningsspærren ikke belastes af tryk fra noget tungt i kurven eller på bakken.

UDFOLDNING

Løft i forreste del af rollator rammen ved udpakning eller ved udklapning fra parkeringsposition iht fig. C.

1. Når rollatoren foldes ud gives et lille tryk nedad på sædet, således at sammenklapningsmekanismen låses fast. Kontrollér, at spærren er gået i indgreb, når rollatoren er foldet helt ud.
2. Sædet er opklappeligt for at give mere gangplads og mulighed for lettere at nå ting i skabe etc.







SAMMENKLAPNING

Kurven tages af inden rollatoren klappes sammen.

1. Tryk på udløseren.
2. Træk sædehåndtaget op.
3. Rollatoren kan foldes i 2 trin:
 - A. Trin 1 for at parkere rollatoren stående på hjul.
 - B. Trin 2 for at gøre rollatoren så flad som muligt til transport. Ved trin 2 kan rollatoren ikke selv stå.
- C. Udfoldning fra transportstilling.



7,10/12 KG

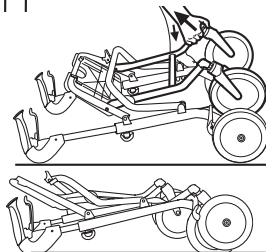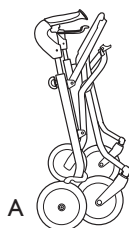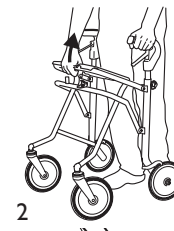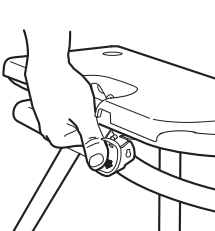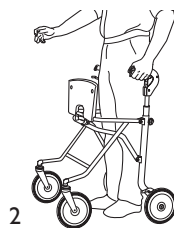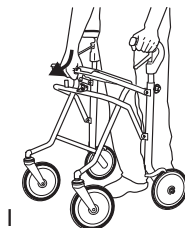

KØREBREMSE

Træk begge bremsegreb opad for at bremse under kørsel.


PARKERINGSBREMSE

1. For at parkeringsbremse rollatoren tryk kes blødt nedad på begge greb. Et tydeligt "klik" fortæller at bremsen er i indgreb.

Parkeringsbrems ALTID med begge greb.


2. Parkeringsbremsen frigøres ved et let træk opad.

Til de brugere, som synes at rollatoren kører for hurtigt og som derfor benytter bremsen meget tit, anbefaler vi en rollator med slæbebremse (tilbehør).

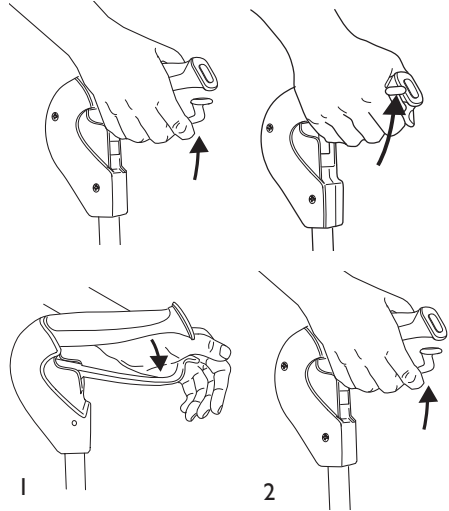

MONTERING AF BAKKE OG KURV


- A. **DOLOMITE MELODY**
B. **DOLOMITE SOPRANO**

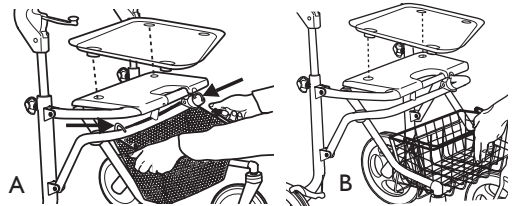


INDSTILLING AF KØREHÅNDTAG

OBS! Bremsen skal være koblet fra før håndtaget justeres.

1. For at indstille håndtagene løsnes højdejusteringsskruerne - uden at skrue dem helt ud.
2. Indstil den ønskede højde, som normalt måles til håndledet.
3. Håndtagene kan vinkelindstilles for at opnå behageligere håndstilling eller aflaste ved rotations begrænsning i håndledene.
4. Når indstillingerne er foretaget fastskrues indstillingsskruerne igen (med uret).

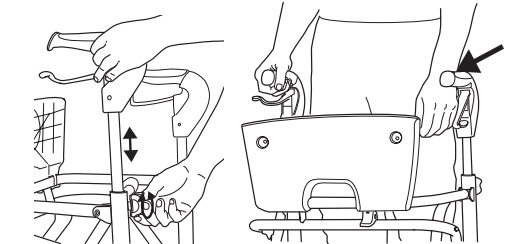

I (4)

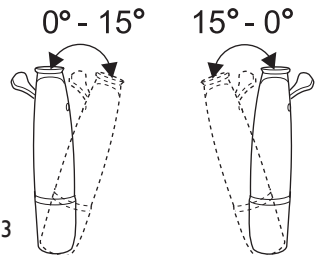

3


OBS! hvis der er fare for at brugeren eller hjælpepersonale utilsigtet indstiller den valgte højde/vinkel kan højdeindstillingsgrebene erstattes med låsemøtrikker (tilbehør).



JUSTERING AF BREMSER

Hvis rollatoren bremses utilfredsstillende justeres med en umbraconøgle nr. 3 (medfølger ikke).

Anbefalet afstand mellem bremsepal og hjul er 0,5 mm.

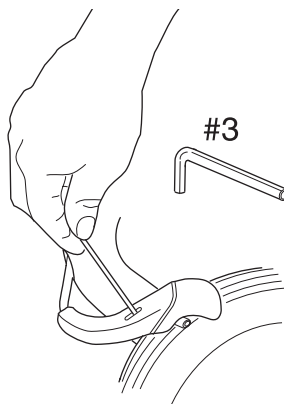

VEDLIGEHODELSE

For at sikre den optimale sikkerhed og funktion bør rollatoren regelmæssigt Gennemgås og vedligeholdes:

- Rengør rollatoren med almindeligt rengøringsmiddel, tør efter med en tør klud og sørg for at hjulene holdes rene.
- Kontroller at skruer og bolte er korrekt fastspændte.
- Ved fejl og skader bør rollatoren ikke anvendes. Tag omgående kontakt med terapeuten eller INVACARE®

Ved uautoriserede ændringer/reparationer udenfor DOLOMITE/INVACARE kontrol påtages intet ansvar.


Max brugervægt: **DOLOMITE MELODY:** 135 kg, **DOLOMITE SOPRANO:** 160 kg.

ANVISNING FOR DESTRUERING AF PRODUKT OG FORPAKNING:

Når produktet er opbrugt skal dette samt tilbehør og forpakkingsmateriale sorteres på en korrekt måde. De enkelte dele kan skilles og behandles ifølge materialebetegnelsen.

På etiketten på rollatoren findes de vigtigste tekniske informationer.

1. Varenummer.
2. Produktnavn.
3. Serienummer.
4. Fabrikationsdato.
5. Max brugervægt.
6. OBS! se brugsanvisningen.
7. Fabrikantens navn.
8. Maks. bredde på rollator
9. Producentens navn

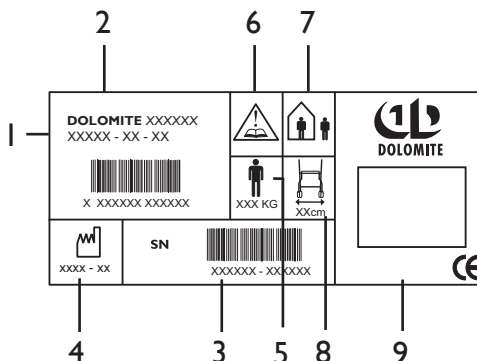

Producent:
INVACARE DOLOMITE AB, Box 200, 343 75 DIÖ, SWEDEN
TEL +46 (0)476 535 00, FAX +46(0)476 535 99

Salgsselskaber:
Invacare A/S, Sdr. Ringvej 39, DK-2605 Brøndby
TEL (45) (0)36 90 00 00, FAX (45) (0)36 90 00 01
denmark@invacare.com