



LIFTBASERET GLIDE- OG VENDESYSSTEM

# MADRASCOVER EASY



EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO)  
PATENT NO. 131168709.7 - 1653  
DKU 201200083



EASY 2



EASY 3

Vare	Art no.	Hmi no.	Produktbetegnelse	Model	Størrelse	Vægt
	MC 004-3000	64120	Madrasclover EASY 2 Large	ILF	L 200 x B 80 cm Glidedel: 60 cm	650 g
	MC 004-3001	74549	Madrasclover EASY 3 Large	ILF	L 200 x B 80 cm Glidedel: 60 cm	700 g



## PÅLÆGNING AF COVER



1 Placer madrascoveret ved sengemadrassens hoveddel, og fold coveret ned omkring madrassens hjørner.



2 Fold efterfølgende coveret omkring madrassens hjørner i bunden.




3 Fold coverets nonslipvinger ind under madrassens midte i begge sider.




4 Coveret ligger korrekt, når der er 10 cm nonslip i begge sider og nonslipvingerne låser mod sengerammen. Coveret tjekkes 1 gang ugentligt.

## FJERNE GLIDEFELT

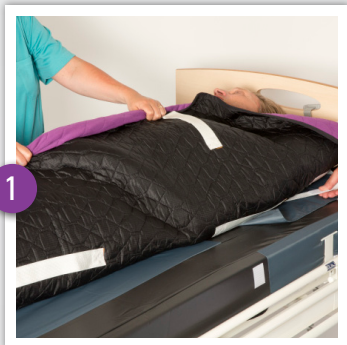

1 Hjælper 1 eller lift strammer Master TURNER'en til omkring brugeren. Hjælper 2 løsner glidefeltets to burrebånd og folder det nederste burrebånd om mod det øverste.

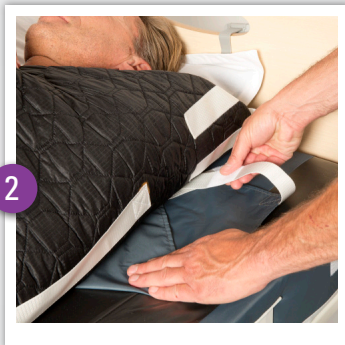

2 Fold derefter det øverste burrebånd henover det nederste burrebånd og skyd det øverste ind under brugeren's nakke.




3 Hjælper 2 eller lift strammer Master TURNER'en til omkring brugeren, og hjælper 1 trækker glidefeltet ud under brugeren.



4 Master TURNER'en låser nu mod antiskridbelægningen på coveret. Brugeren's krop er nu låst mod underlaget i det område, hvor glidefeltet er fjernet.


## GENPLACERING AF GLIDEFELT

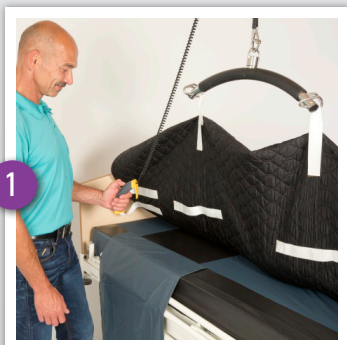

1 Master TURNER'en monteres på liften og der liftes ca. 20 gr.



2 Hjælper placerer glidefeltet dobbeltlagt, og med håndfladerne skydes glidefeltet ind mellem Master TURNER og Madrascover. Start med at skyde mod midten og glat efterfølgende ud mod siderne.

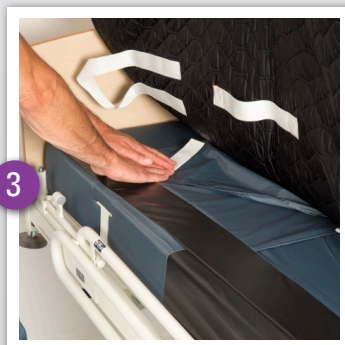

3 Burrebåndene placeres ovenpå glidefeltet og skydes med begge hænder ind under brugeren's naturlige hulrum (nakke, lænd, knæhuser og over hælen).



4 Master TURNER'en monteres på liften på modsatte side og der liftes ca. 20 gr. Hjælper kan nu tage fat i burrebåndene og trække glidefeltet ud og låse Burrebåndene på coveret