


# Master TURNER

## DUO Large


# BRUGERVEJLEDNING

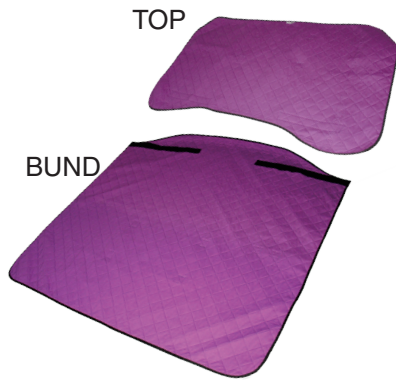


Master TURNER DUO  
Large Soft og Frotté



Master TURNER DUO  
Large Two In One Soft

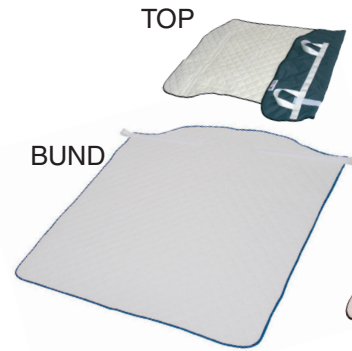

Master TURNER DUO  
Large Two In One Frotté

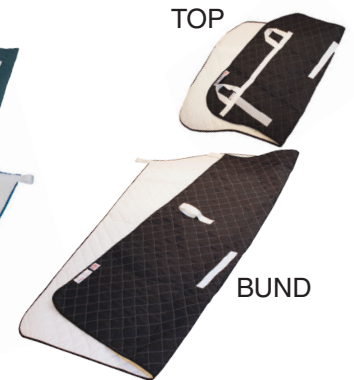

Master TURNER DUO  
Large Elastic



## Når mobiliteten forringes...



## ...forbedrer vi livskvaliteten!

Vare	Art no.	Hmi no.	Produktbetegnelse	Model	Størrelse	*L/B	Vægt
	MC 001-1701	49206	Master TURNER DUO Top	Soft	L 100 x B 150 cm	L	760 g
	MC 001-1700	49207	Master TURNER DUO Bund	Soft	L 160 x B 150 cm	L	1100 g
	MC 001-1901	38937	Master TURNER DUO Top	Frotté	L 100 x B 150 cm	L	800 g
	MC 001-1900	38936	Master TURNER DUO Bund	Frotté	L 160 x B 150 cm	L	1110 g
	MC 001-2501	49872	Master Turner DUO Two In One Top	Soft	L 100 x B 145 cm	L	1000 g
	MC 001-2500	49873	Master Turner DUO Two In One Bund	Soft	L 160 x B 145 cm	L	1560 g
	MC 001-2001	42278	Master Turner DUO Two In One Top	Frotte	L 100 x B 145 cm	L	1050 g
	MC 001-2000	42279	Master Turner DUO Two In One Bund	Frotte	L 160 x B 145 cm	L	1540 g
	MC 001-1961	40030	Master Turner DUO Top	Elastic	L 100 x B 145 cm	B	720 g
	MC 001-1960	40032	Master Turner DUO Bund	Elastic	L 160 x B 145 cm	B	1100 g

\* L=lagervare, hvor det kan forventes, at varen afsendes indenfor 3 arbejdsdage  
B=bestillingsvare, her kan påregnes op til ca. 3 ugers leveringstid

# Master TURNER

## DUO Large



### A. Montering af Master TURNER DUO



1A) Master TURNER DUO Bundstykke placeres først oven på det pålagte madrascover. Den glatte del på Master TURNER DUO Bundstykke ligger ned mod madrascoveret. De to bløde stykker burrebånd vender op mod sengens midte.



2A) Placer dernæst Master TURNER DUO Topstykke, ligeledes med den glatte side ned mod madrascoveret, og fastgør Topstykkets burrebånd til Bundstykket.



3A) Ved korrekt montering af Master Turner DUO, vender etikken "Denne side opad og op mod hoveddel" op mod senges hovedgavl.

### B. Brug af lagen ovenpå Master TURNER DUO



1B) For at beskytte Master TURNER DUO kan et lagen placeres oven på.



2B) For at beskytte bundstykket yderligere, kan et inkontinensunderlag placeres og skydes op under topstykket. Vil man undgå lagener ovenpå Master TURNER DUO, anbefales et ekstra bundstykke til at skifte med.


### C. Placering af bruger på Master TURNER DUO



1C) Master TURNER DUO trækkes helt op, så den lige rammer hovedgavlen på sengen.



2C) Brugeren placeres så det sorte kantbånd på Master TURNER DUO vil ramme i lænden på brugeren.

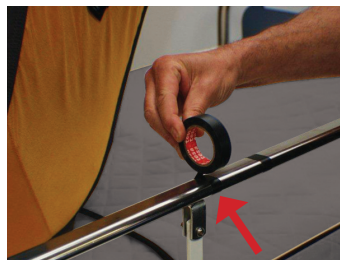

3C) Find ud af hvor brugeren skal lande og marker punktet med 2 stk. tape på sengehesten.



# Master TURNER

## DUO Large



### D. Vending med lift



1D) Kryds eller bøj brugerens ben, hvis det er muligt. Monter stropperne på topstykket på liftens åg både fra top og bundstykke.



2D) Stram hoftelås til, således at top og bundstykkets stropper er lige stramme. Sengehesten eleveres i samme side som stropperne er sat på.



3D) Lift så der kommer luft under skulderbladene og hofter, og skub derefter bruger over til sengehesten.



4D) Placer brugerens skulder og pude og lift efterfølgende op, således bruger ligger øverst på hoftekammen. Træk derefter det øverste ben frem, og brugeren er nu vendt.

### E. Positionering i sideleje



1E) Inden bruger vendes i sideleje, placeres Slide MASTER Wide skråtliggende mellem brugers ben.



2E) Master Turner DUO Bundstykke skilles fra Master Turner DUO Topstykke.



3E) Placer en Comfort MASTER vaskekile ud for brugerens hofter, Brugerens ben glides nu op på Comfort MASTER Vaskekile ved hjælp af Slide MASTER Wide.

### F. Placering af sejl



1F) Lav et knæk ved knæene på sengen og fjern glidedelen under benene.



2F) Hovedgærdet eleveres en smule og sejlet skydes nu ned mellem Master TURNER DUO og madrascoveret, benstropperne placeres langs brugerens ben.



3F) Master TURNER DUO Top og bund skilles fra hinanden.



4F) Master TURNER DUO Top foldes og trækkes op mod brugerens nakke. Master TURNER DUO Bund foldes og trækkes ned under brugerens knæ. Sejlet er nu frit og kan monteres på lift.

# Master TURNER

## DUO Large



### Vaskeanvisning

DUO Soft og Frotté modellerne kan vaskes ved 80 grader C



Kun skånsom tørretumbling

Two In One og Elastic modellerne kan vaskes ved 90 grader C



Kun skånsom tørretumbling




#### ADVARSEL

Der må ikke anvendes skylle- eller blegemiddel. Dette forringer glideeffekten.

For at undgå problemer ved vask af Master TURNER DUO systemerne, er det vigtigt at sætte medfølgende burrebånd på topstykkerne, når disse vaskes. Det er vigtigt, at burrebåndene altid følger topstykkerne. Skulle de forsvinde, kan nye bestilles hos Master CARE.

### Max. belastning

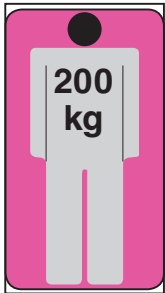

Max. belastning pr. håndtag:  
35 kg

7 Punkts



#### VIGTIGT

- Sørg hele tiden for at dette Master CARE hjælpemiddel er intakt ved jævnlige eftersyninger.
- Hvis dette hjælpemiddel har en kritisk slitage eller på anden vis har skader, må det ikke benyttes.
- Er du i tvivl om brugen af dette hjælpemiddel, skal du omgående kontakte Master CARE.



#### ANSVAR

- Anvendes dette hjælpemiddel forkert eller u hensigtsmæssigt, påtager Master CARE sig ikke ansvaret for ulykker, der medfører alvorlige personskader.



#### ADVARSEL

- Forlad aldrig bruger med liften hægtet på Master TURNER DUO.
- Forlad aldrig bruger for tæt på sengemadrassens kant eller siddende ude ved eller på denne med Master TURNER DUO.
- Forlad aldrig bruger liggende på Master TURNER DUO, uden at sengeheste i sider er hævet.
- Anvend aldrig Master TURNER DUO som et løftesejl ved at løfte bruger fra underlaget med denne tilkøbet en personløfter.

### Produktbeskrivelse

Master TURNER DUO Large består af et top- og et bundstykke og udgør tilsammen et liftbaseret glide- og vendelagen.

**Master TURNER DUO Soft** har en blød hudvenlig jersey overflade, der er flammehæmmende samt elastisk. Er tyndt polstret for at sikre åndbarhed og er vatteret med allergiforebyggende og fugtabsorberende specialfibre, der forebygger dannelsen af svampe og allergi.

**Master TURNER DUO Frotté** er vatteret med Øko-TEX fibre og har en overflade i frotté.

For at undgå fugt i at gennemtrænge er **Two In One systemerne** forsynet med en indvendig elastisk fugtspærre.

**Master TURNER DUO Elastic** har en elastisk overflade bestående af PU belagt polyester. Er tyndt polstret for at sikre åndbarhed og er vatteret med allergiforebyggende og fugtabsorberende specialfibre, der forebygger dannelsen af svampe og allergi.

Systemerne har glat underside i specialfremstillet nylon med unikke glideegenskaber HLF (Hyper Low Friction) samt flere håndtag, som giver mulighed for god håndtering, samt vending enbloc.

Soft-modellerne er specialfremstillet til brug ovenpå trykafastende madrasser og sikrer optimal udnyttelse af madrassens egenskaber.

### Anvendelse

Master TURNER DUO Large anvendes som et permanent liftbaseret glide- og vendelagen. Master TURNER DUO systemet kan anvendes til både den aktive bruger og til brugeren, der har behov for aflastning under hele kroppen samt brugere, der har behov for støtte i ryggen ved personlig pleje i sengen. Two In One systemet er til den inkontinente bruger. Personalet kan ved brug af dets håndtag foretage manuelle forflytninger, og hvis bruger er tung eller modarbejdende, kan systemet tilkobles en hvilken som helst gulv- eller loftlift. Ved anvendelse af lift nedsættes arbejdsbelastningen for personalet væsentlig og gør forflytningerne mere behagelig for bruger. Det unikke ved Master Turner DUO systemet er den delbare funktion, der gør det muligt for plejepersonalet at foretage nedre personlig pleje med brugeren holdt i sideleje ved hjælp af lift. Endvidere giver hofteåsen øget komfort under vending.

### Fordele

- Er allergiforbyggende
- Kan anvendes med alle typer gulv- eller loftlife
- Leveres med mange håndtag for god håndtering
- Har unikke glideegenskaber - HLF (Hyper Low Friction), og er dermed tryksårsforebyggende, da risikoen for shear mindskes
- Lang holdbarhed
- Top- og bundstykker kan kombineres med alle de øvrige top og bundstykker, der er i vores Master Turner DUO sortiment
- Soft modellen har en tynd polstring for at forebygge varme
- Soft modellen er dokumenteret til brug på trykafastende madrasser
- Two In One modellen har indvendig fugtspærre
- Bundstykket er forsynet med hofteåse, således bruges vending enbloc