

# Master GLIDE®



The ORIGINAL Scandinavian Human Handling System



Art. nr. MC 001-6000   
Hmi nr. 36390  
Master GLIDE Junior  
Størrelse: L 40 x B 20 cm  
Antal håndtag: 2  
Tykkelse: 5 mm  
Vægt: 380 g

Art. nr. MC 001-7000   
Hmi nr. 34160  
Master GLIDE Flexi Small  
Størrelse: L 40 x B 35 cm  
Antal håndtag: 3  
Tykkelse: 5 mm  
Vægt: 520 g

Art. nr. MC 001-6010   
Hmi nr. 36391  
Master GLIDE Senior Small  
Størrelse: L 45 x B 35 cm  
Antal håndtag: 2  
Tykkelse: 5 mm  
Vægt: 680 g

Art. nr. MC 001-7026   
Hmi nr. 53378  
Master Glide Multi Medium  
Størrelse: L 60 x B 35 cm  
Antal håndtag: 5  
Tykkelse: 5 mm  
Vægt: 680 g

Art. nr. MC 001-7030   
Hmi nr. 53192  
Master GLIDE Heavy Small  
Størrelse: L 45 x B 22 cm  
Antal håndtag: 2  
Tykkelse: 12 mm  
Vægt: 740 g

Art. nr. MC 001-7010   
Hmi nr. 33246  
Master GLIDE Flexi Medium  
Størrelse: L 60 x B 35 cm  
Antal håndtag: 3  
Tykkelse: 5 mm  
Vægt: 880 g

Art. nr. MC 001-6020   
Hmi nr. 36392  
Master GLIDE Senior Medium  
Størrelse: L 60 x B 35 cm  
Antal håndtag: 2  
Tykkelse: 5 mm  
Vægt: 780 g


Art. nr. MC 001-7027   
Hmi nr. 53379  
Master GLIDE Multi Large  
Størrelse: L 70 x B 35 cm  
Antal håndtag: 5  
Tykkelse: 5 mm  
Vægt: 780 g

Art. nr. MC 001-7035   
Hmi nr. 53193  
Master GLIDE Heavy Medium  
Størrelse: L 60 x B 22 cm  
Antal håndtag: 2  
Tykkelse: 12 mm  
Vægt: 1.160 g

Art. nr. MC 001-7020   
Hmi nr. 33247  
Master GLIDE Flexi Large  
Størrelse: L 75 x B 35 cm  
Antal håndtag: 3  
Tykkelse: 5 mm  
Vægt: 1.120 g

Art. nr. MC 001-7040   
Hmi nr. 53194  
Master GLIDE Heavy Large  
Størrelse: L 70 x B 22 cm  
Antal håndtag: 2  
Tykkelse: 12 mm  
Vægt: 1.260 g

## Når mobiliteten forringes...

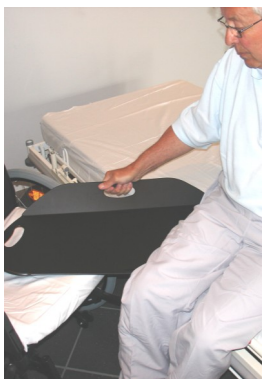


... forbedrer vi livskvaliteten !

# Master GLIDE® CE


The ORIGINAL Scandinavian Human Handling System

## BRUGERVEJLEDNING


### A. Overflytning mellem stol og seng (delvis aktiv bruger, der selv kan betjene hjælpemidlet)

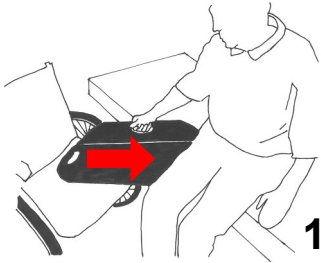

1  
Brugeren læner sig en smule over mod den hofte, der vender ind i seng. Holder i det midterste håndtag på Master GLIDE. Fører glidebrættet ind under sædeballe, der vender ud mod kørestolen.

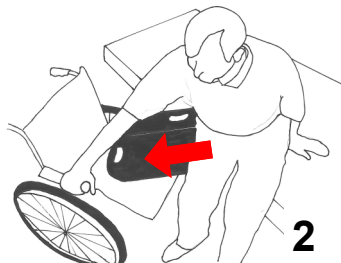


2  
Bruger læner sig nu mod glidebrættet og får derved vægten af den højre sædeballe lagt på glidebrættet. Bruger griber med den ledige hånd i håndtag på kørestolen og glider nu ved hjælp af Master GLIDE over på kørestolens sæde.

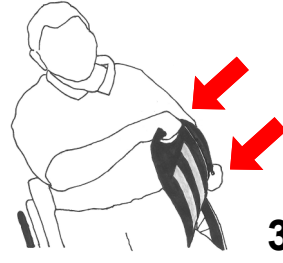


3  
For at fjerne Master GLIDE igen, griber bruger i begge håndtag på Master GLIDE og bøjer dette op. Nu løftes Anti Skrid belægningen på glidebrættet op fra underlaget. Glidebrættet holdes spændt og trækkes ud under sædepartiet.

### B. Overflytning mellem stol og seng med diverse tilbehør med eller uden hjælper

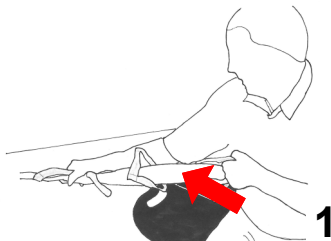


1  
For at give tryk og aktivering, kan bruger anvende Hmi nr. 36414, 36415 Bed Grip MASTER Sengebånd til at trække sig over i seng. Sengebåndet fæstnes til sengen.

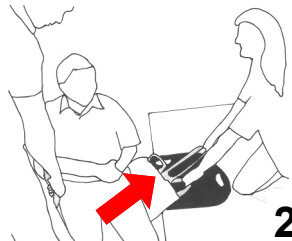

2  
Hvis der er højdeforskel mellem kørestol og seng, kan Hmi nr. 43273, 43274 og 43277 Return MASTER med fordel anvendes.




3  
For at hjælpe bruger med overflytningen, kan Hmi nr. 37424, 37426 Mini MASTER anvendes. Denne foldes sammen og placeres ind under brugerens sæde. Hjælper trækker i håndtag samtidig med, at han holder i brugers hånd for støtte og tryk. Bruger glider nu over i kørestol.

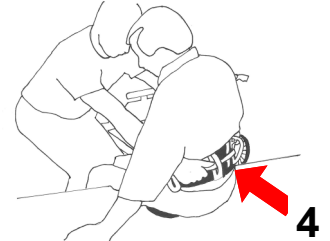


4  
For at hjælpe med overflytning og samtidig støtte bruger, kan Hmi nr. 33237, 33238, 33239 og 42302 Master BELT med fordel anvendes. Dette sættes fast om brugers talje. Hjælper griber i håndtag og støtter med knæ. Bruger flyttes nu over i kørestol.


### C. Overflytning mellem kørestol og seng (med en eller flere hjælpere)

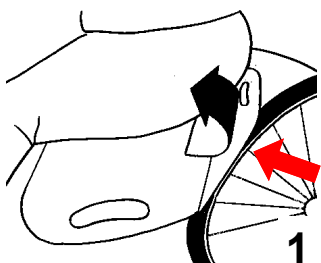


1  
Master GLIDE Glidebrættet er placeret ind under brugers sæde. For at brugeren ikke skal støde ind i hjulet ved overflytningen, bøjes den bagerste kant på Master GLIDE op og skærmer derved mod kørestolens hjul.

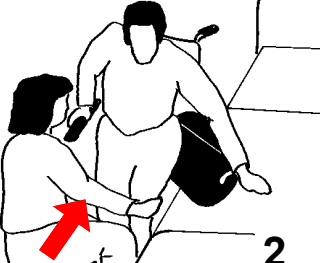

2  
Højdeforskellen fra det man flytter fra, bør være lidt højere end det, man flytter til, derved vil man glide lettere. Er det modsat bør hjælper stille sig foran bruger for at skabe og sikre tryk, mens brugeren glider fra f.eks. kørestol til seng. Dette for at undgå at bruger glider af Master GLIDE.

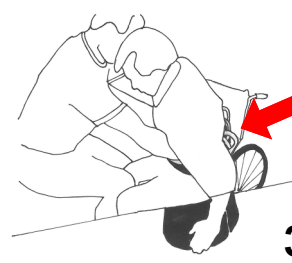

3  
For yderligere hjælp kan Master BELT Aktiverings- og støttebælte anvendes. Hjælper griber fat i håndtag på bæltet, støtter foran mod brugers knæ og hjælper brugeren med at glide ovenpå Master GLIDE.

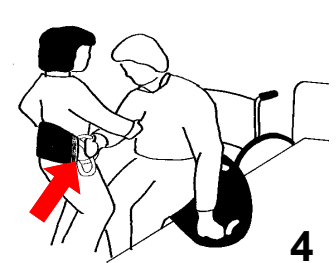

4  
Hjælper kan også anvende Mini MASTER. Herved får brugeren et håndtag at holde i.


# Master GLIDE®




The ORIGINAL Scandinavian Human Handling System

## BRUGERVEJLEDNING


### D. Overflytning af bruger med bar hud

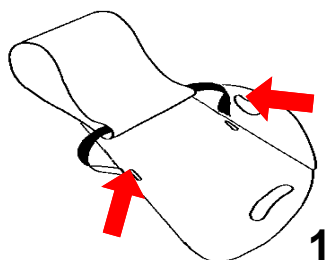

Du har nu valgt det løse Master GLIDE Glidestykke. Åben velchrolåsen på glidestykket, før dets ender ned i de to spor på Master GLIDE fra overfladen og ned.

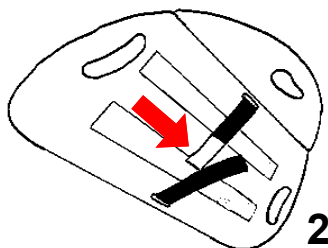


Enden af begge bånd vil derefter stikke ud gennem sporene på underside af Master GLIDE. Lås disse sammen med Velchro låsen. Glidestykket er nu monteret på Master GLIDE's midte.

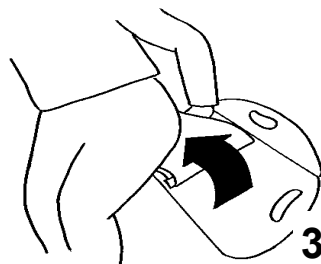

Placér håndfladen indeni glidestykket, der nu er monteret på Master GLIDE, og skyd dette ind under det sæde, der vender mod glidebrættet. Brugeren glider nu over ved at glidestykket ruller mod overfladen uden at der opstår friktion mod den bare hud.

### E. Overflytning af mindre aktiv bruger

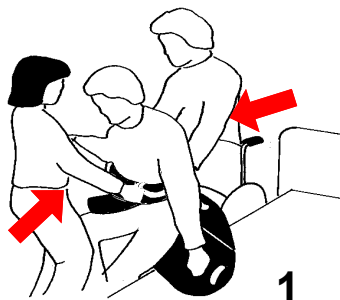


Er brugeren mindre aktiv, bør et Master BELT anvendes. Den ene hjælper støtter foran og den anden bagved brugeren.



En hjælper kan også anvende Mini MASTER og samtidig stå foran bruger.

### F. Overflytning mellem kørestol og bilsæde

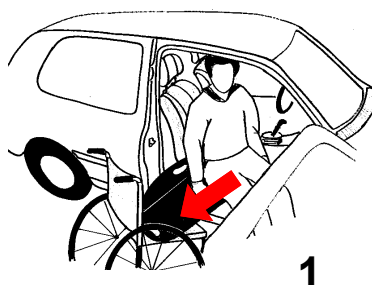

Ved overflytning mellem kørestol og bilsæde anvendes ofte Master GLIDE Large, da glideafstanden ofte er længere.

## Tilbehør til Master GLIDE



Hvis Master GLIDE ønskes opbevaret på et centralt sted, kan Master RACK Vægophæng med fordel anbefales.

**Master RACK Vægophæng** Art. nr. MC 002-1282  
Hmi nr. Tilbehør  
Størrelse: H 9 x B 8,5 x D 7,5 cm



Rejen trykkes ned over kørestolens hjul, og gør det derved glat, så bruger ikke hænger i gummi-belægningen på hjulet.

**Rejen Small/medium/Large**  
Art. nr. MC 001-5005/5010/5015  
Hmi nr. 30752/30753/30754  
Dæk: 25/31/33 mm



Anvendes Master GLIDE til overflytning, hvor brugeren har bar hud f.eks. mellem seng og bækkenstol eller bækken/badestol og toilet anvendes et specialudviklet glidestykke. Dette kan monteres på Master GLIDE Flexi

**Master GLIDE Glidestykke**  
Art. nr. MC 001-7025  
Hmi nr. 50148  
Størrelse: L 60 x B 38 cm

## Beskrivelse af de forskellige modeller

### Master GLIDE Junior®

Består af en afstivet fleksibel plade med 2 håndtag, som anvendes til børn.

### Master GLIDE Flexi®

Består af en afstivet fleksibel plade med 3 håndtag. Den bageste ende kan bøjes op for afskærmning af kørestols hjul. Det fås i small, medium og Large.

### Master GLIDE Senior®

Består af en afstivet fleksibel plade med 2 håndtag. Der er udhuling, som giver plads til hjulet på kørestolen. Det fås i medium og large og kan bruges til alle typer brugere.

### Master GLIDE Multi®

Består af en afstivet fleksibel plade med 5 håndtag. Den bageste ende kan bøjes op for afskærmning af kørestols hjuldæk. Forkanten kan bøjes ned.

### Master GLIDE Heavy

Består af en fast plade med 2 håndtag, som anvendes til tunge brugere med behov for ekstra lang afstand mellem flyttepunkterne.

## VIGTIGT

Hvis dette hjælpemiddel har en kritisk slitage eller på anden vis har skader, må det ikke benyttes.

Er du i tvivl om brugen af dette hjælpemiddel, skal du omgående kontakte Master CARE

## ANSVAR

Anvendes dette hjælpemiddel forkert eller uhensigtsmæssigt, påtager Master CARE sig ikke ansvaret for ulykker, der medfører alvorlige personskader.



Hjul på begge overflytningsunderlag SKAL være blokeret inden overflytning foretages. Dette for at undgå ulykker med alvorlige personskader til følge.




Hvis Master GLIDE ikke ligger plant eller, hvis man anvender det tilhørende glideestykke kan der være stor risiko for at bruger glider af glidebrættet og falder på gulvet med alvorlige skader til følge.

## produktbeskrivelse

Master GLIDE leveres i flere varianter og størrelser. Det unikke ved Master GLIDE er, at Glidebrættene er udformet af fleksibelt miljøvenligt polyæthylen plast. Dette bevirker, at Master GLIDE føles rar og behagelig at sidde på, da den former sig til underlaget, og samtidig har en stivhed, hvor den bygger bro mellem flyttepunkter. Glidebrættene har unikke glideegenskaber. Master GLIDE's fleksible udformning gør det nemt at placere og nemt at fjerne igen.

Master GLIDE Heavy udskiller sig fra de andre glidebrætter ved at det består af en afstivet plade. Det er specielt til brug ved overflytninger med større afstande mellem flyttepunkter. Overflytning personvægt 150 kg med op til 40 cm afstand mellem flyttepunkter. Har afrundede kant i side og håndtag.

Alle Master GLIDE Glidebrætter har Anti-Skridd belægning på undersiden, hvilket bevirker, at det ligger stabilt mod et hvert underlag. De leveres med runde og grebsvenlige håndtag. Alle Master GLIDE Glidebrætter kan spritrenses med alle tilgængelige desinficeringsvæsker.

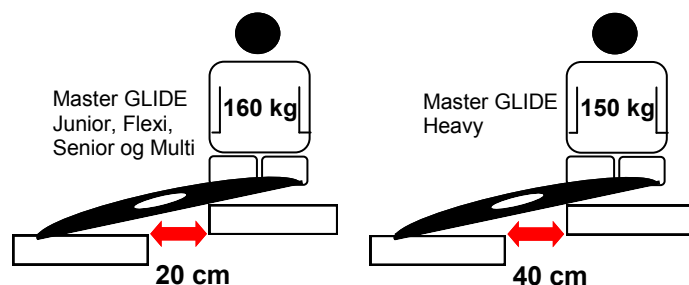

Afstand mellem flyttepunkterne må med brugervægt 160 kg ikke overstige 20 cm. Hvis dette ikke overholdes kan bruger falde ned mellem flyttepunkter med alvorlige personskader til følge.

Afstand mellem flyttepunkterne må med brugervægt 150 kg ikke overstige 40 cm. Hvis dette ikke overholdes kan bruger falde ned mellem flyttepunkter med alvorlige personskader til følge.



Master CARE  
Sofienlystvej 3  
DK-8340 Malling  
Danmark



Tel. +45 86 93 85 85  
Fax. +45 86 93 85 05  
info@master-care.dk  
www.master-care.dk