



## Brugsanvisning Strømpepå- og aftager




Stik foden så langt ned i "posen" De kan

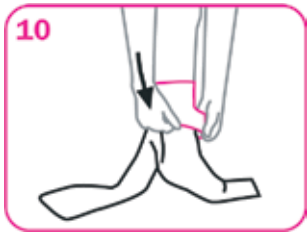

Træk Deres strømpe eller strømpebuks ned til det punkt, hvor **Mediven® 2 in 1** starter (omkring læggen)  
Nu lægger De linningen eller kantbåndet på Deres kompressionsstrømpe over **Mediven® 2 in 1**

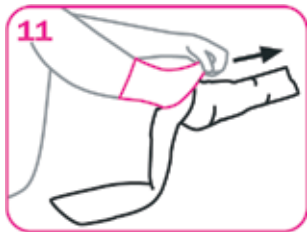

Nu kan De let trække strømpen over hælen og fodryggen i retning mod spidsen af foden

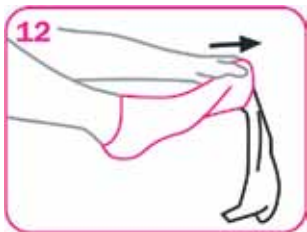

Når De har taget kompressionsstrømpen af, befinder **Mediven® 2 in 1** sig inde i strømpen



**DANPLEJE**  
ONEMED DENMARK A/S

P.O. Pedersens Vej 16  
DK-8200 Århus N  
Tlf. 86 109 109  
Fax 86 109 209  
danpleje@onemed.com  
www.onemed.dk

mediven® **2 in 1** ↓

Strømpepå- og -aftageren **Mediven® 2 in 1** er specielt tilpasset til kravene for alle brugere af kompressionsstrømper og forenkler to nødvendige procedurer:

At få kompressionsstrømpen over fodryggen og hælen på en let måde både ved påtagning og aftagning

### Vaskeanvisning:


Hjælpe midlet **Mediven® 2 in 1** kan uden problemer vaskes med andet tøj i vaskemaskinen på skåneprogram op til 40 grader

Brug hverken kemiske rensmidler eller pletfjerner til rengøringen


Lad **Mediven® 2 in 1** lufttørre

Varmekilder som ovne eller radiatorer skal undgås


Brug ikke tørretumbler

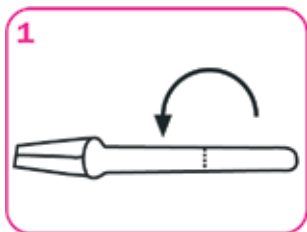


Læg **Mediven® 2 in 1** fladt på gulvet, når strømpen skal tages på  
Den lange ende på **Mediven® 2 in 1** foldes langs med den stiplede linie

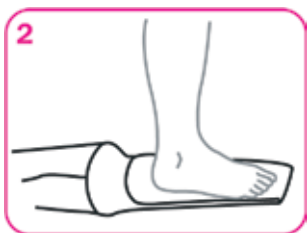


Den nøgne fod sættes på **Mediven® 2 in 1**  
I den forbindelse skal tæerne pege i retning mod den omslåede kant  
Vær opmærksom på, at der både foran ved tæerne og bagtil ved hælen ligger tilstrækkeligt med stof (min. 3 cm.)

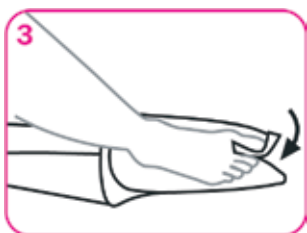


Skub stoffet let ind mellem Deres tær, for at holde fast på stoffet

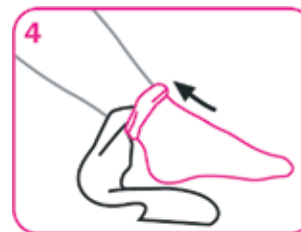

Træk strømpen på over fodryggen og hælen i retning mod knæet

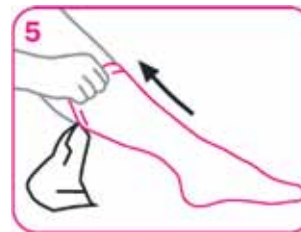


**Mediven® 2 in 1** bliver i strømpen og rager ud bagtil ved læggen

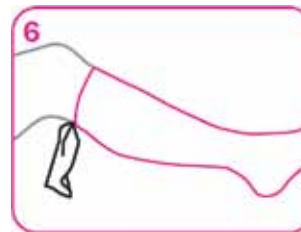

Træk strømpen op til ca. en håndsbredde under knæet  
Herefter er det let at trække **Mediven® 2 in 1** ud



Til det formål tager De fat i den del af **Mediven® 2 in 1**, som stadig stikker ud af strømpen, og løfter hælen noget  
Nu kan De let og uden større kraftanstrengelse trække **Mediven® 2 in 1** ud af Deres kompressionsstrømpe eller strømpebuks

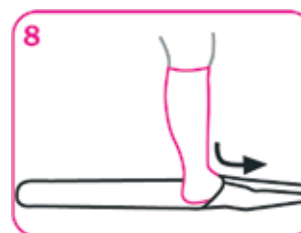

Læg **Mediven® 2 in 1** fladt på gulvet, når strømpen skal tages af