

Montering af madras


Til RotoBed®Free hører en madras bestående af en hoved-del samt en fod-del.

Hovedmadrasen er udstyret med 5 knapper på bagsiden. Anbring først de tre nederste knapper i rillerne nederst i liggefladen. Skub madrassen mod fodenden. Nu trykkes de to knapper midt på madrassen ned i de tilhørende huller midt på liggefladen.

Tilsvarende har fodmadrasen to knapper, som trykkes ned i de to knaphuller i liggefladen.

Montering af sengeheste

RotoBed® senge kan leveres med sengehest af metal eller egetræs-laminat. Uanset model monteres og fjernes sengehestene på samme måde:

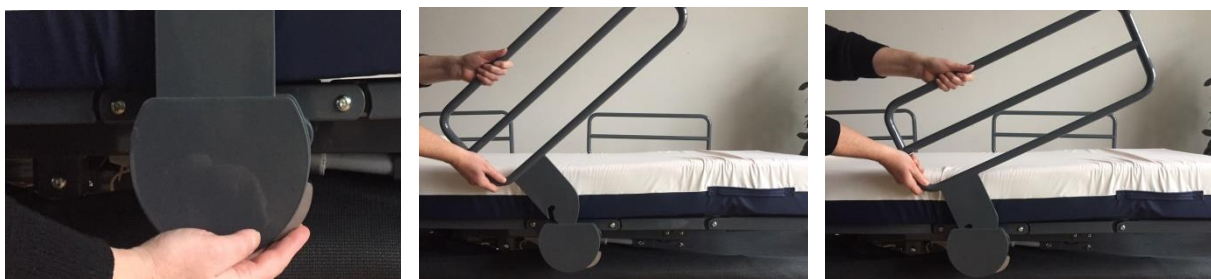

Tryk på det lille beslag fornedet samtidig med, at sengehesten løftes. Sengehestene sættes på igen og låser automatisk.

Hjul og bremser

Sengen er som standard udstyret med integral Tente Linea dobbelthjul. Hjulene er drejelige og parvis bremsbare, og de kan betjenes fra begge sider af sengen.



OBS: RotoBed®Free bør ikke benyttes af personer uden introduktion i brugen af sengen. Sengen er testet efter de nyeste gældende normer og regler for plejesenge. RotoBed®Free skal udelukkende betjenes med fjernbetjeningen. Vær opmærksom på, at hverken børn eller dyr befinder sig under sengen, når sengens dele indstilles. Når sengens ben-del er hævet, må denne ikke belastes af personer eller tunge genstande. Sengen må benyttes af brugere indenfor følgende kriterier: Vægt 40-190 kg. Højde \geq 146 cm. BMI \geq 17.

Betjening af RotoBed® Free



Udstigning: Hold tasten **Stoleposition** inde, til sengen standser i udstigningsposition. For at lette udstigningen, kan ryglænet køres det sidste stykke frem og sengen hæves lidt i højden.



Ønsker man en skrå udstigning for at lette overgang til kørestol eller rollator, se brugsanvisningen.




Indstigning: Skub enden så langt tilbage som muligt for bedste komfort. Hold tasten **Liggeposition** inde, indtil sengen er drejet rundt, og liggefladen er vandret. Nu fungerer RotoBed® Free som en almindelig plejeseng.



Standard sædehøjde uden madras er 32 cm over gulvet. For individuel indstilling, se brugsanvisningen.

Fjernbetjening

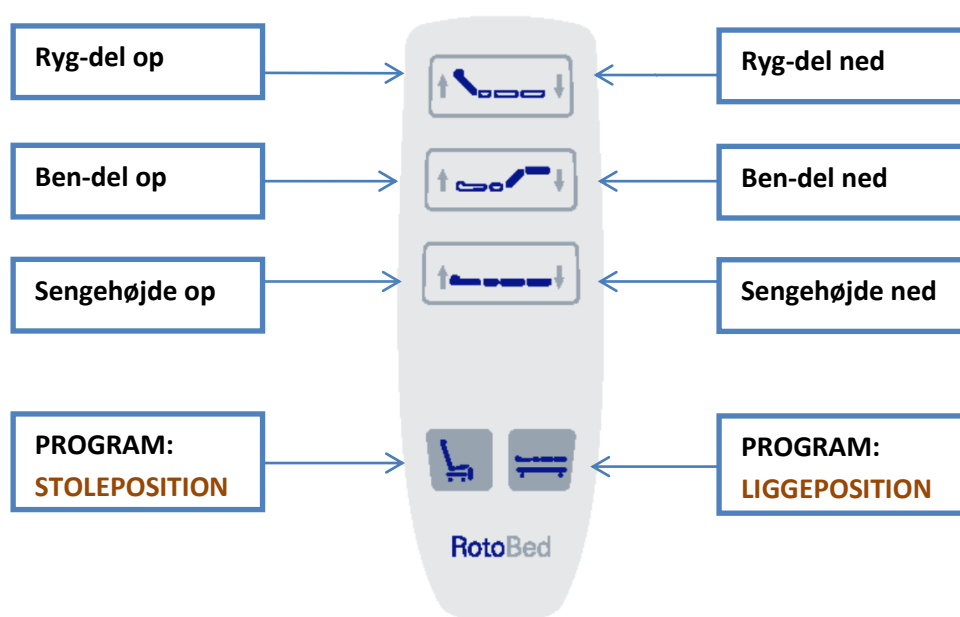

RotoBed® Free kan dreje både til højre og venstre. Fjernbetjeningen kan derfor valgfrit tilsluttes højre eller venstre side af sengen. Efter ønske kan tilkøbes ekstra fjernbetjening.

Når fjernbetjeningen ikke anvendes, hænges den på sengehesten.