

Passer til BASIC Sejl



- Art. nr. MC 003-9031
Hmi nr. [48792](#)
Sling SOCK Medium Basic
Størrelse: L 50 x B 26 cm

Passer til TOILET/AKTIV Sejl



- Art. nr. MC 003-9032
Hmi nr. [48793](#)
Sling SOCK Medium Toilet/Aktiv
Størrelse: L 60 x B 23 cm

Passer til AMPUTATIONS Sejl



- Art. nr. MC 003-9033
Hmi nr. [48794](#)
Sling SOCK Medium Amputation
Størrelse: L 70 x B 23 cm

- Art. nr. MC 003-9034
Hmi nr. [55707](#)
Sling SOCK Large Basic
Størrelse: L 70 x B 30 cm

- Art. nr. MC 003-90
Hmi nr. [Opdat](#)
Sling SOCK Large Toilet/Aktiv
Størrelse: L 80 x B 26 cm

- Art. nr. MC 003-90
Hmi nr. [Opdat](#)
Sling SOCK Large Amputation
Størrelse: L 90 x B 26 cm

Når mobiliteten forringes ...



... forbedrer vi livskvaliteten !

Sling SOCK




The ORIGINAL Slide cushion for slings

BRUGERVEJLEDNING

A. Placering af Sling SOCK i stol

**1**

Før din hånd ind i og næsten igennem Sling SOCK

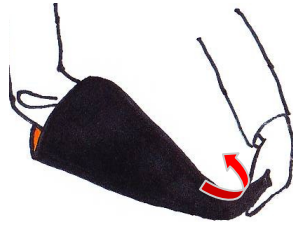**2**

Fold derefter forreste del ca. 10 cm som vist på tegningen

**3**


Før den ene håndflade ind under det punkt ved bruger, hvor Sling SOCK skal føres ind. Skyd derefter Sling SOCK ind.

**4**

Vær opmærksom på, at den bredeste side af Sling SOCK skal vende ind mod løftesejlets midte, så stropperne sidder på ydersiden af løftesejlet.

**5**

Tag fat i Sling SOCK's begge ender og brug savende bevægelser frem og tilbage, så den glider endeligt på plads.

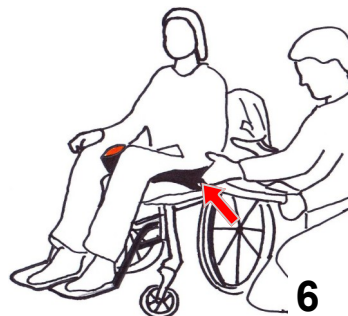**6**

Før løftesejlets benstrop ind i Sling SOCK. Dette gøres fra ydersiden og ind.

**7**

Før derefter hånden ind i Sling SOCK fra modsatte side og grib fat i løftesejlets strop for at trække denne ud.


**8**

Udfør det samme på modsatte side.

**9**

Den ene hjælper fører afslutningsvis håndfladen ind i Sling SOCK og presser håndfladen ned mod stolens sæde. Samtidig trækker den anden hjælper i løftesejlet for at det endeligt er placeret. Løftesejlet er nu placeret og klar til at hægtes på liften.

B. Fjerne løftesejl

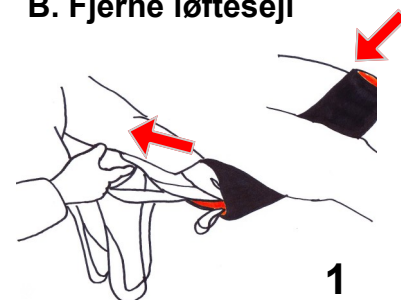**1**

Løftesejlet er nemt at fjerne ved blot at trække dette ud af Sling SOCK uden løft eller ubehag for bruger.


Sling SOCK



The ORIGINAL Slide cushion for slings

BRUGERVEJLEDNING

C. Placering af Sling SOCK i seng

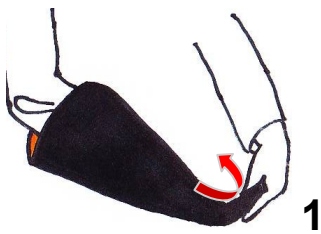


1

Følg samme fremgangsmåde som i Punkt. A. 1,2 og 3.




2

Skyd Sling SOCK under brugers lårhals i begge sider.

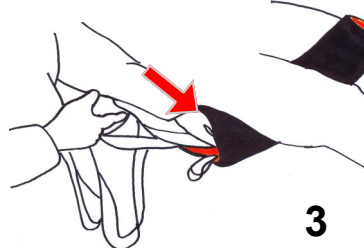

3


Før derefter løftesejlets benstropper ind i Sling SOCK. Benstropperne glider nu indeni Sling SOCK.

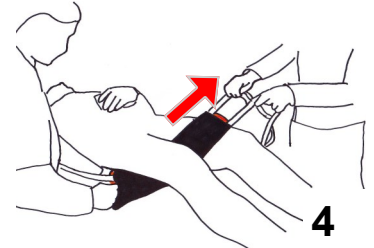

4


Den ene hjælper trækker i benstroppen, mens den anden hjælper trækker modsat i Sling SOCK. Dette udføres på begge sider af bruger. Bruger er nu klar til at blive løftet.

D. Placering af Sling SOCK ved bruger af Master TURNER DUO Delbart Glide- og vendelagen.

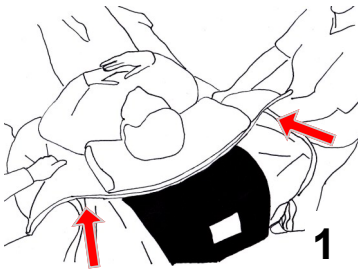


1

Fold løftesejlet og før dette ind mellem Topstykke og madrascoverets glatte flader. Skyd og glid løftesejlet fra oven og ned mod brugerens lænd.

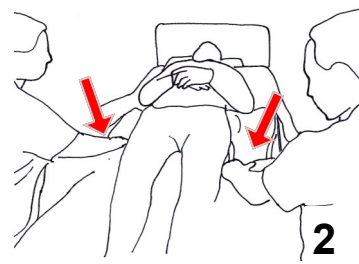


2

Skil Master TURNER DUO Top fra bund ved at åbne velchrobånd i sider.

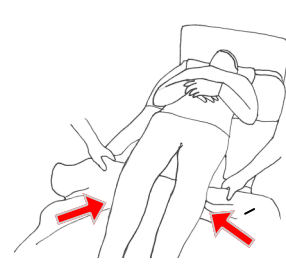


3

Fold og rul bundstykket på Master TURNER DUO ned mod brugerens knæ.

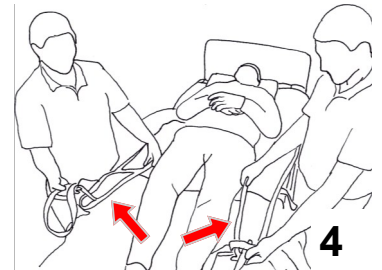


4

Løftesejlets benstropper kommer nu frem. Før Sling SOCK ind under brugerens ben som vist i Punkt A. Del. 1,2 og 3.

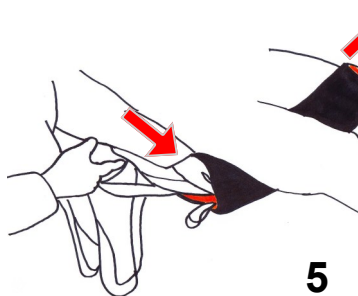

5

Før derefter løftesejlets benstropper ind i Sling SOCK i hver side.

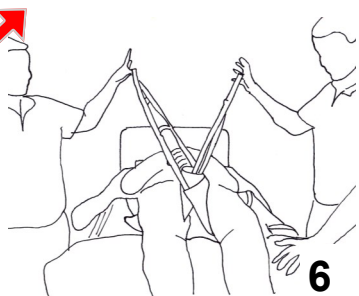

6

Løftesejlet er nu placeret og bruger kan nu løftes op fra underlaget. Topstykket må gerne følge med i løftet og fjernes afslutningsvis i stolen. Hvis ikke, foldes dette blot ned og rulles op under brugerens hovedpude.

Beskrivelse af de forskellige modeller

(1) Sling SOCK[®] BASIC

Består af et polstret hylster med glat yder- og inderside. Glidematerialet er af specialfremstillet PU belagt nylon HLF (Hyper Low Friction). Sling SOCK BASIC passer til Basic løftesejl.

(2) Sling SOCK[®] Toilet/Aktiv

Består af et polstret hylster med glat yder- og inderside. Glidematerialet er af specialfremstillet PU belagt nylon HLF (Hyper Low Friction). Sling SOCK Toilet/Aktiv anvendes til toilet løftesejl.

(3) Sling SOCK[®] Amputation

Består af et polstret hylster med glat yder- og inderside. Glidematerialet er af specialfremstillet PU belagt nylon HLF (Hyper Low Friction). Sling SOCK Amputation anvendes til amputation løftesejl.

Vaskeanvisning

Sling SOCK kan vaskes ved 80 grader C.



Der må ikke anvendes skyllemiddel, da dette forringer glideeffekten.

Max. brugervægt

Personvægt: 250 kg



VIGTIGT

Sørg hele tiden for, at dette Master CARE hjælpemiddel er intakt ved jævnligt at efterse syninger.

Hvis dette hjælpemiddel har en kritisk slitage eller på anden vis har skader, må det ikke benyttes.

Er du i tvivl om brugen af dette hjælpemiddel, skal du omgående kontakte Master CARE.

ANSVAR

Anvendes dette hjælpemiddel forkert eller uhensigtsmæssigt, påtager Master CARE sig ikke ansvaret for ulykker, der medfører alvorlige personskader.

Produktbeskrivelse

Sling SOCK[®] består af et polstret glidestykke i form af et hylster. Løftesejlets benstropper føres ind i Sling SOCK[®], således at disse bliver polstrede og glatte. Dette bevirker, at benstropper på løftesejlet bliver nemmere at føre ind og trække ud under brugerens ben i liggende eller siddende position. Derved forebygger man unødige løft for hjælper og gør placeringen af løftesejlet meget mere bekvemt for brugeren. Ydermere forebygger Sling SOCK friktion på lår og risiko for sårdannelse. Sling SOCK[®] er utrolig nem at bruge. Sling SOCK[®] leveres i flere størrelser og kan anvendes til de fleste typer løftesejl med både lav og høj ryg.

