



BRUGERMANUAL

VELA TANGO 100/100FB/100A/200



INDHOLDSFORTEGNELSE

1.0. INDLEDNING	3
1.1. GENERELT	4
Reklamationsret	4
Udpakning af stolen	4
Vedligehold af VELA Tango	4
Vigtige retningslinjer	5
1.2. VELA TANGO BRUGERMANUAL	6
Ekstra udstyr	7
1.3. TEKNISK DATA	8

1.0. INDLEDNING

Kære Kunde

Vi vil gerne takke dig for købet af VELA Tango. Vi er sikre på, at den bliver til daglig glæde for dig. Brugermanualen omhandler nyttige oplysninger om indstilling, betjening, vedligeholdelse, tekniske data mv.

Denne brugermanual omhandler VELA Tango 100/100FB/100A/200.

Vigtigt

Læs venligst denne brugermanual grundigt, og gem den til senere brug. Den skal altid være til rådighed for brugeren. Denne brugermanual skal altid følge stolen.

Den kan også findes på VELAs website: www.vela.eu

Har du spørgsmål, kan du kontakte VELA.

Du kan ligeledes finde information om VELA Tango på VELAs website: www.vela.eu

Sikkerhed

Denne stol er CE-mærket og overholder alle gældende EU-regler.

Stolen er produceret af VELA, Vermund Larsen A/S, Gøteborgvej 12, 9200 Aalborg SV, Danmark.

Formålet med VELA Tango er en indendørs stol til siddende personer.

VELA forbeholder sig ret til ændringer.

1.1. GENERELT

REKLAMATIONSRET

VELA giver reklamationsret jf. købeloven. Reklamationsretten gælder kun ved anvendelse af originale reservedele og tilbehør, samt tilpasninger foretaget af autoriseret servicetekniker. VELA påtager sig ikke ansvar for skader på produktet eller brugeren, der er opstået pga.:

- Transport
- Misbrug
- Almindelig slitage
- Forkert brug
- Brug af uoriginale reservedele og tilbehør
- Tilpasninger foretaget af uautoriseret servicetekniker

TRANSPORT

Ved transport af VELA Tango bør man altid huske at låse stolen. Det må ikke sidde personer i stolen under transport.

- Temperatur under transport: minus 40 grader til plus 70 grader
- Fugtighed: fra 15% - 95%
- Lufttryk: ppp til 1000 meter over sø niveau

UDPAKNING AF STOLEN

VELA Tango leveres i en papemballage, der er udviklet med hensyn til miljøet og med brugervenligheden i fokus.

Såfremt der er mangler eller transportskade ved stolen, bedes du straks kontakte VELA. Du må ikke selv forsøge at reparere evt. skader eller tage stolen i brug.

Den kasse, stolen leveres i, skal indeholde:

- VELA Tango monteret med evt. ekstra tilbehør
- Denne brugermanual

VEDLIGEHOLDELSE AF VELA Tango

Vi anbefaler et årligt eftersyn af VELA Tango for at finde frem til eksempelvis defekte og slidte dele. Man bør selv regelmæssigt efterspænde de aftagelige dele.

Hjul

Det anbefales med jævne mellemrum at efterse hjul og rense for eventuelle trådrester etc.

Stel

Vask med lunkent vand evt. tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

POLSTER

Polstret skal vedligeholdes med støvsugning og en hårdt opvredet klud i vand. Evt. indkøbt inconti-betræk vaskes i vaskemaskinen på skåneprogram.

Ved pletter; Sørg for at fjerne pletten hurtigst muligt. Benyt altid en ren, hvid bomuldsklud.

VIGTIGE RETNINGSLINJER

For rigtig brug af VELA Tango bør man overholde følgende:

STABILITET OG BALANCE

VELA Tango er designet som en hverdagsstol til brug i hjemmet eller på arbejdspladsen. Den er beregnet til stillesiddende arbejde. Alle bevægelser i VELA Tango har indvirkning på placeringen af tyngdepunktet.

For at øge sikkerheden anbefaler vi:

- Maksimal brugervægt er 125 kg, dog er aktivitetsniveauet en væsentlig faktor. En person med kraftige bevægelser i stolen bør kontakte en salgskonsulent før køb
- Man må ikke stå i stolen
- Ved forflytning bør stolen altid låses

GENBRUG

En del af stolens materiale kan genbruges. Lever stolen til VELA eller din lokale genbrugsstation.

1.2. VELA TANGO BRUGERMANUAL

◀ SIDDEHØJDE

Højden på VELA Tango justeres ved hjælp af gasfjeder. Dette gør man ved at trække i håndtaget i højre side.

◀ SÆDEVINKLING

Sædevinklingen reguleres med håndtaget, som er placeret bag på stolen, i højre side.

◀ ROTATION (kun nogle modeller)

Rotation af sædet gøres ved at trække i håndtaget i venstre side.

◀ RYGVINKLING

Ryggen vinkles med håndtaget som er placeret bagerst i højre side. Husk at stramme den godt bagefter.

◀ RYGHØJDE

Ryghøjden reguleres med håndtaget som er placeret bag på stolen i højre side. Husk at stramme den godt bagefter.

◀ BREMSER

VELA Tango har en centralbremse som aktiveres ved hjælp af bremsestangen til højre eller venstre. Man kan selv flytte bremsen fra højre til venstre ved at fjerne gummiproppen og sætte bremsen over i det andet hul. Håndbremsen presses frem for at låse hjulene og tilbage for at låse dem op igen.



ARMLÆN

Armlænene kan reguleres i såvel højden som bredden.

◀ HØJDEREGULERING

Højden indstilles ved at løsne skruen på armlænsstangen. Husk at stramme dem godt igen.



◀ BREDDEREGULERING

Bredden indstilles ved at løsne skruen under sædet og justere metalskinnen som holder armlænet. Husk at stramme dem godt igen.



◀ INDSTILLING AF ARTHRODESEKLAPPER (VELA Tango 100A)

Højden på arthrodeseklapperne kan indstilles, så de tilpasses den enkelte.

De indstilles ved at løsne en af de to håndskruer under sædet, hvorefter den ønskede vinkel indstilles og håndskruen strammes igen.



◀ RYG-RIGLEN (VELA TANGO 200)

Ryglænet på VELA Tango 200 kan låses i den ønskede vinkel ved at stramme håndtaget bagpå ryggen.



◀ MULIGHED – NIVEAUREGULERING

Niveauregulering i 3 starthøjder, fra lav til høj model. (se skitse på yderrøret). Det må kun foretages af en tekniker fra VELA, eller af en uddannet person indenfor dette felt.



EKSTRA Udstyr

◀ FODRING

Fodringen bruges ved at skubbe til den med foden så den enten svinges ind eller ud. Fodringen må ikke bruges til at stå på ved ind- og udstigning, da stolen kan vælte.

1.3. TEKNISK DATA

KONSTRUKTION:

- Hvelvet stålstel i profilrør, at alle hjul har kontakt, også på ujævnt gulv
- Hvert hjul er fastgjort med hjultap i tårn
- Yderrør i lakeret stål med spor for intervalregulering
- Højdejustering ved teleskopisk aktuator

	VELA Tango 100 VELA Tango 100FB	VELA Tango 100A	VELA Tango 200
Højdejustering vha.	Gas, 350N	Gas, 350N	Gas, 500N
Sæde	44 x 44 cm	Arthrodese-sæde med to indstillelige klapper. 44 x 44 cm	47 x 49 cm
Sædevinkling	-6° / +3°	-6° / +3°	-6° / +3°
Sædedybde	37-44 cm	37-44 cm	33-49 cm
Ryg, CY	37 x 30 cm	37 x 30 cm	43 x 45 cm
Rygvinkling	-10° / +13°	-10° / +13°	-20° / +6°
Armlæns pude PU	9 x 30 cm	9 x 30 cm	9 x 30 cm
Armlæns højde	0-24 cm	0-24 cm	0-24 cm
Afstand mellem armlæn	37-51 cm	37-51 cm	41-55 cm
Siddehøjde	38-48 cm 40-55 cm 42-57 cm 47-62 cm 47-67 cm 52-67 cm	38-48 cm 40-55 cm 42-57 cm 47-62 cm 47-67 cm 52-67 cm	40-55 cm 42-57 cm 47-67 cm 47-62 cm 52-67 cm 38-48 cm
Intervalregulering	-2 / +10 cm	-2 / +10 cm	-2 / +10 cm
Arthrodese klap	-	0°-25°	-
Rotation (udvalgte modeller)	360 grader (ej Tango 100FB)	360 grader	360 grader
Understel	55 x 55 cm	55 x 55 cm	55 x 55 cm
Vægt	20 kg	20 kg	23 kg
Kapacitet	125 kg	125 kg	125 kg

