



# BRUGERMANUAL





## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>1.0. INDLEDNING</b> .....	3
<b>1.1. REKLAMATIONSRET</b> .....	4
<b>1.2. TRANSPORT</b> .....	4
<b>1.3. UDPAKNING AF STOLEN</b> .....	4
<b>1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO 300</b> .....	4
<b>1.5. VELA TANGO 300 BRUGERMANUAL</b> .....	6
Siddehøjde .....	6
Rygvinkling og ryghøjde .....	6
Armlæn .....	7
Bremseser .....	7
Opladning af VELA Tango 300E .....	7
<b>1.6. TEKNISK DATA</b> .....	8
1.6.1 Stabilitet og balance .....	8
1.6.2. Genbrug .....	8

## 1.0 INDLEDNING

### **Kære Kunde**

Vi vil gerne takke dig for købet af VELA Tango 300/300E. Vi er sikre på, at den bliver til daglig glæde for dig. Brugermanualen omhandler nyttige oplysninger om indstilling, betjening, vedligeholdelse, tekniske data mv.

Denne brugermanual omhandler VELA Tango 300 og VELA Tango 300E.

### **Vigtigt**

Læs venligst denne brugermanual grundigt, og gem den til senere brug. Den skal altid være til rådighed for brugeren. Denne brugermanual skal altid følge stolen.

Den kan også findes på VELAs website: [www.vela.eu](http://www.vela.eu)

Har du spørgsmål, kan du kontakte VELA.

Du kan ligeledes finde information om VELA Tango 300/300E på VELAs website: [www.vela.eu](http://www.vela.eu)

Stolen er produceret af VELA, Vermund Larsen A/S, Gøteborgvej 12, 9200 Aalborg SV, Danmark.

Formålet med VELA Tango 300/300E er en indendørs stol til siddende personer.

VELA forbeholder sig ret til ændringer.

## 1.1 REKLAMATIONSRET

Denne stol er CE-mærket og overholder alle gældende EU-regler.

VELA giver reklamationsret jf. købeloven. Reklamationsretten gælder kun ved anvendelse af originale reservedele og tilbehør, samt tilpasninger foretaget af autoriseret servicetekniker. VELA påtager sig ikke ansvar for skader på produktet eller brugeren, der er opstået pga.:

- Transport
- Misbrug
- Almindelig slitage
- Forkert brug
- Brug af uoriginale reservedele og tilbehør
- Tilpasninger foretaget af uautoriseret servicetekniker

## 1.2 TRANSPORT

Ved transport af VELA Tango bør man altid huske at låse stolen. Det må ikke sidde personer i stolen under transport.

Temperatur under transport: minus 40 grader til plus 70 grader

Fugtighed: fra 15% - 95%

Lufttryk: ppp til 1000 meter over sø niveau

## 1.3 UDPAKNING AF STOLEN

VELA Tango leveres i en papemballage, der er udviklet med hensyn til miljøet og med brugervenligheden i fokus.

Såfremt der er mangler eller transportskade ved stolen, bedes du straks kontakte VELA. Du må ikke selv forsøge at reparere evt. skader eller tage stolen i brug.

### **Den kasse, stolen leveres i, skal indeholde:**

- VELA Tango 300 eller VELA Tango 300E monteret med evt. ekstra tilbehør
- Denne brugermanual

## 1.4 VEDLIGEHOLDELSE AF VELA Tango 300/300E

Vi anbefaler et årligt eftersyn af VELA Tango 300/300E for at finde frem til eksempelvis defekte og slidte dele. Man bør selv regelmæssigt efterspænde de aftagelige dele.

Hjul

Det anbefales med jævne mellemrum at efterse hjul og rense for eventuelle trådrester etc.

Stel

Vask med lunkent vand evt. tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

## **Polster**

Betrækket er lavet af uld, som blot skal vedligeholdes med støvsugning og en hårdt opvredet klud i vand. Evt. indkøbt inconti-betræk vaskes i vaskemaskinen på skåneprogram.

## **Pletfjerning, Uld**

(Har du købt i et andet stof, fx. microfiber, så kontakt VELA for nærmere information om pletfjerning)

Sørg for at fjerne pletten hurtigst muligt. Benyt altid en ren, hvid bomuldsklud.

Blod: Blod vaskes af i koldt vand. Hvis det ikke hjælper, tilsæt da et pH-neutralt opvaskemiddel.

Blæk: Fjern så meget som muligt med trækpapir. Rens med 20% denatureret sprit. Vask efterfølgende med vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

Chokolade, fedt & slik: Vask med lunkent vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

Græs & grøntsager: Vask med lunkent vand evt. tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

Kaffe, te & mælk: Fjern så meget som muligt med trækpapir. Vask med vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

Kuglepen & kosmetik: Rens med husholdningssprit.

Skosvæerte: Dup forsigtigt med en klud fugtet med rensbenzin eller husholdningssprit.

Stearin: Varmt strygejern over sugende papir. Rens med terpentin. Dup med lunkent vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel. Alternativ: Se tyggegummi.

Syltetøj, sirup, frugt & juice: Fjern så meget som muligt med en ske. Vask herefter med lunkent vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

Tyggegummi: Køl med isterning i plasticpose eller fryseelement. Skrab væk. Evt. rest kan fjernes forsigtigt med rensbenzin.

Urin: 1 del eddike uden farve blandes med to dele vand. Brug en tør klud som underlag, når pletten gennemvædes. Fjern eddike blandingen med skiftevis tør og vandholdig klud.

Vin & spiritus: Fjern så meget som muligt med trækpapir. Vask med vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel, og rens med fortyndet denatureret sprit.

## 1.5 VELA TANGO 300 BRUGERMANUAL



### ◀ SIDDEHØJDE

Højden på VELA Tango 300 reguleres enten ved hjælp af el eller gas. VELA Tango 300 kan fås med fast højde, hvorefter det ikke er muligt at regulere højden.

#### **Regulering af siddehøjden vha. gas**

I højre side er der et håndtag, som skal trykkes op.



#### **Regulering af siddehøjden vha. el**

Regulering af siddehøjden ved hjælp af el gøres ved at trykke på knappen på armlænet.

Højdefunktionen må max. bruges i 2 minut, derefter 18 minutters pause.



### ◀ SÆDEDYBDE

Sædedybden reguleres ved at løsne umbraco-skruerne under sædet (ved ryggen), hvorefter du kan skubbe ryggen frem.



### ◀ RYGVINKLING OG RYGHØJDE

Ryggen kan justeres i højden ved at løsne umbraco-skruerne.

Ryggen vinkles ved at løsne umbraco-skruen på ryg-riglen, og tilpasse den til den ønskede vinkel. Husk at spænde riglen godt.

Ryghøjden justeres ligeledes ved at løsne umbraco-skruerne.



### ◀ **ARMLÆN**

Armlænene er som standard skruet fast med umbraccoskruer, men kan fås med håndskruer.

### HØJDEREGULERING

Højden på armlænene justeres ved at løsne umbraccoskruerne på hvert armlæn. Husk at stramme godt igen.

### BREDDEREGULERING

Bredden på armlænene justeres ved at løsne umbraccoskruerne under sædet. Husk at stramme godt igen.

**BEMÆRK.** De må kun trækkes ud til den røde label med teksten "STOP".



### ◀ **BREMSE**

VELA Tango 300/300E har centralbremse, som aktiveres ved hjælp af bremsestangen til højre eller venstre. Håndbremsen skubbes frem for at låse hjulene, og tilbage for at låse hjulene op.

### ◀ **OPLADNING AF VELA TANGO 300E**

Det anbefales at oplade VELA Tango 300E dagligt (en signaltone høres når højdefunktionen er i brug, hvis batteriniveauet er for lavt). Stolen lades ved at sætte stikket fra laderen i stikket på stolen. Stikket på stolen findes bagerst, lige under sædet i højre side.



Laderen har en lysdiode, hvor en gul lampe viser at lading pågår. Grøn lampe viser at lading er fuldført.

**ADVARSEL:** Stolen må ikke benyttes under lading.

### **VIGTIG INFORMATION - VELA TANGO 300E**

Stolens el-funktion opfylder EMC-kravene i henhold til IEC 60601-1-2. Radiosendingsudstyr, mobiltelefoner osv. skal ikke bruges i nærheden af apparatet siden det kan påvirke apparatets funktion. Der må udvises speciel forsigtighed under brug af stærkt forstyrrende kilder som højfrekvent kirurgisk udstyr o.l., og at HF-kabler ikke lægges i nærheden af apparatet. Hvis du er i tvivl, må du kontakte en kvalificeret tekniker hos VELA.

## 1.6. TEKNISKE DATA

	VELA Tango 300	VELA Tango 300E
<b>Siddehøjde</b>	Højdejustering vha. gas: 44-59 cm Fast siddehøjde, efter mål: Dog minimum 42 cm.	42-57 cm
<b>Siddehøjde, alternativ</b>	-	49-69 cm
<b>Sæde</b>	58 x 48 cm	58 x 48 cm
<b>Ryg, CX eller efter mål</b>	38 x 43 cm	38 x 43 cm
<b>Armlæn</b>	7 x 35 cm	7 x 35 cm
<b>Understel</b>	58 x 58 cm	58 x 58 cm
<b>Vægt</b>	32 kg	43 kg
<b>Brugervægt</b>	Gas: 175 kg Fast siddehøjde: 200 kg	200 kg
<b>Hmi-nr.</b>	18196	18598

### 1.6.1. STABILITET OG BALANCE

VELA Tango er designet som en hverdagsstol til brug i skolen eller i hjemmet. For at øge sikkerheden anbefaler vi:

- Maksimal brugervægt er 175-200 kg (se teknisk data), dog er aktivitetsniveauet en væsentlig faktor. En person med meget kraftige bevægelser i stolen bør kontakte en salgskonsulent før købet
- Man må ikke stå i stolen
- Ved forflytning bør stolen altid låses.

### 1.6.2. GENBRUG

En del af stolens materiale kan genbruges. Lever stolen til VELA, eller din lokale genbrugsplads.

