




VELA Uni-22

Du har valgt en VELA stol.
Tillykke !
Vi er sikre på, at den bliver
til daglig glæde for dig. Her
har du nyttige oplysninger
om indstilling mv. Brug et
par minutter på at lære din
VELA stol at kende - og gem
hæftet til senere brug.

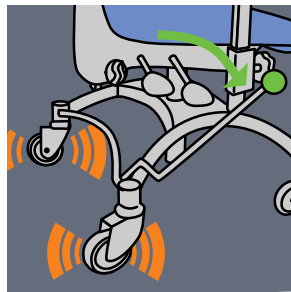


Bremse

Siddehøjde.

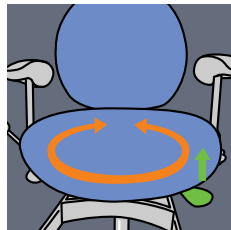
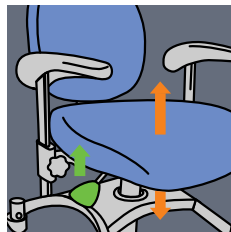


Rotationslås

Sædevinkling.

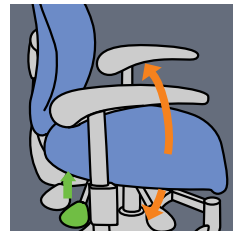


Ryghøjde

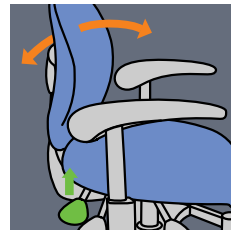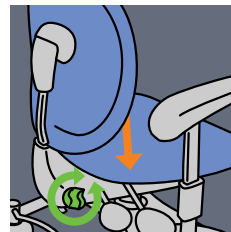


Rygvinkling.





Vinkelrigle

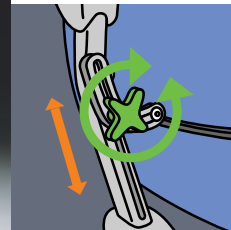


Højderegulering.

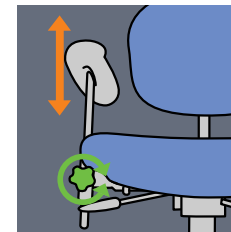

Breddeindstilling.

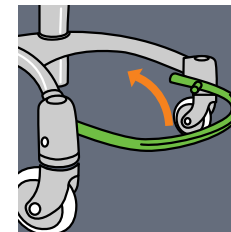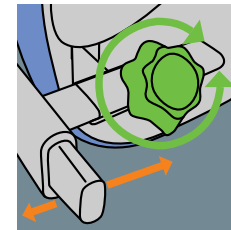

Ekstra udstyr:
Opklappelig
fodring

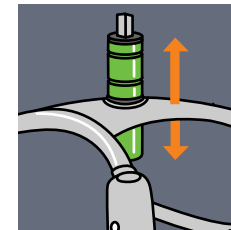

Mulighed:
Niveauregulering
i 3 starthøjder fra
lav til høj model.
(se skitse på
yderrøret.)

VELA Uni-22

Producent:
Vermund Larsen A/S
DK-9200 Aalborg
www.vela.dk

6022be2DK

Stolen er vedligeholdelsesfri.

Hjul: Det anbefales med jævne mellemrum at efterse hjul og at rense for eventuelle trådrester o.l. Bremsfunktionen bør kontrolleres. (Brems-hjulet er forsynet med en justeringskrue.)

Søjle: Såfremt stolen efter års brug fornemmes "stiv" vil en let smøring af søjlens inderrør med en syrefri olie forøge den fjedrende virkning.

Polster: Stofbetræk er som standard en vaskbar microfiber polyester. Stoffet er antistatisk og smudsafvisende behandlet.



Service:

VELA stolen er dækket af fabrikkens garanti i 24 mdr. Ved henvendelse om tilbehør e.l. kan denne stol identificeres ud fra produktetiketten som findes under sædet.

)22be2DK

