



Victor Reader ClassicX 3.3 ved HumanWare

Kom i gang session med Victor Reader ClassicX

Velkommen til Victor Reader ClassicX, din nye digitale talende bogafspiller. Den første gang, du anvender Victor Reader, bør du tilslutte afspilleren til lysnettet.

For at tilslutte til lysnettet sættes den ene ende af det medfølgende 220v kabel i strømstikket. Det er placeret på bagsiden af afspilleren, lidt til venstre for midten. Sæt den ene ende af 220v kablet i stikkontakten. Når du første gang modtager afspilleren, eller hvis du har skiftet batteri, eller ikke har brugt afspilleren for en længere periode, er det bedst at sætte afspilleren til opladning hen over natten for at sikre, at batteriet er fuldt opladet.

Oven over tænd/sluk knappen er der en grøn LED indikator. LED indikatoren vil blinke, når afspilleren er slukket, og tilsluttet til lysnettet. Blinkene betyder, at afspilleren lades op. Når den stopper med at blinke, er afspilleren helt ladet op. Når der tændes for afspilleren, lyser LED indikatoren hele tiden, uanset om den er tilsluttet til lysnettet eller ej. Under normale omstændigheder tager det op til 4 timer at lade batteriet helt op. Det vil give op til 10 timers afspilletid for de fleste DAISY bøger.

Bemærk venligst, at du kan anvende Victor Reader under opladning af batteriet.

Pakken indeholder følgende ting: En Victor Reader ClassicX, et 220v kabel, en plastikpos med dokumentation og denne CD. Denne CD indeholder en kort Kom i gang session, efterfulgt af Brugervejledningen.

Du kan holde pause og genoptage læsningen ved blot at trykke **Start/Stop** knappen, som er placeret fornedet i midten af afspilleren imellem **Tilbagespoling** og **Fremadspoling** knapperne.

Vi vil nu begynde Kom i Gang session. Placer afspilleren med fronten imod dig, og med bærehåndtaget mod venstre. Oven over håndtaget i det øverste venstre hjørne er der en indbygget højttaler.

På oversiden i midten er der tre sæt knapper for op og nedregulering. De er fra venstre mod højre Tone, Lydstyrke og Hastighed.

Nedenunder Tone-, Lydstyrke- og Hastighedsknapperne omkring midten af enheden vil du finde Navigeringsknapperne - som peger **OP**, **NED**, **VENSTRE** og **HØJRE**. Disse gør det muligt for dig at flytte igennem strukturen i en bog.

Til venstre for de fire Navigeringsknapper omkring midtvejs nede på afspilleren er der yderligere to knapper. Den øverste er **Info** knappen, og den nederste er **Bogmærke** knappen. **Info** knappen giver dig din aktuelle position i bogen, samt generel information om bogen. **Bogmærke** knappen indsætter bogmærker for at gemme vigtige sider og afsnit for fremtidig reference.

Nedenunder de fire Navigeringsknapper vil du fra venstre mod højre finde: **Tilbagespoling**, **Start/Stop** og **Fremadspoling** knapperne.

Til venstre for **Tilbagespoling** knappen og nedenunder **Bogmærke** knappen finder du **Dvale** knappen. Den er ovalt udformet og en anelse undersænket. Der er en gul LED indikator oven over den.

Til højre for og lidt oppe for **Tilbagespoling**, **Start/Stop** og **Fremadspoling** knapperne finder du yderligere to knapper. Den øverste, som er lidt forsænket, er **Tænd/Sluk**, og nedenunder denne er **Eject** knappen, som benyttes til at skubbe CD'en ud af drevet.

På den højre side af afspilleren regnet bagfra mod forkanten finder du lineudgangen (identificeret med 2 nedadrettet taktile markeringer). Den anvendes for tilslutning af afspilleren til et lydanlæg. Dernæst finder du et **fjernbetjeningsstik** (identificeret med en enkelt nedadrettet taktile markering) for tilslutning af en fjernbetjeningskontakt (ekstra tilbehør) for håndfri betjening af Start/Stop og Tilbagespolingsfunktionerne. Til slut

tæt ved forkanten er stikket til hovedtelefon, som også kan benyttes til eksterne højttalere. Dette stik er markeret med en opadrettet taktil markering.

Du finder strømstikket på bagsiden af afspilleren lidt til venstre for midten. Det anvendes for tilslutning af afspilleren til en stikkontakt.

På forsiden af afspilleren finder du sprækken til CD-ROM drevet.

At indsætte og afspille en ny bog

Tænd for Victor Reader ved at trykke og holde **Tænd/Sluk** knappen, som findes oven over **Eject** knappen på oversiden af afspilleren, nede. Du vil høre et lydssignal og en velkomstmeldelse.

Indsæt din CD'er i sprækken, som findes foran på afspilleren. Skub forsigtigt CD'en fremad. Drevmekanismen vil så tage over, og automatisk sørge for indsættelsen af CD'eren. Efter et par sekunder vil Victor Reader annoncere titlen på bogen, og starte afspilningen.

Bemærkning: *Hvis du ved at uheld kommer til at vende CD'en forkert, vil den blive skubbet ud efter 15 sekunder uden at have taget skade.*

Du kan justere Tone, Lydstyrke og Hastighed ved at trykke op eller ned knapperne. Tone, Lydstyrke og Hastighed kontrollerne er placeret øverst oppe foroven fra venstre mod højre.

For at gå tilbage eller fremad i bogen ved høj hastighed skal du trykke og holde **Tilbagespoling** eller **Fremadspoling** nede, indtil du er kommet til det ønskede sted, og derefter slippe den. Den normale afspillehastighed vil blive genoptaget.

For at holde en pause i oplæsningen

For at holde en pause i oplæsningen af en bog tryk blot **Start/Stop**. For at genoptage læsningen, hvor du stoppede, tryk igen **Start/Stop**. Bemærk, at hvis din afspiller ikke er tilsluttet til lysnettet, og hvis den er i pausetilstand for mere end 30 minutter, vil den automatisk selv slukke for at spare på batteriet.

For at slutte oplæsningen

For at afslutte en oplæsning så sluk blot for afspilleren ved at trykke og holde **Tænd/Sluk** nede. Victor Reader vil huske, hvor du nåede til i bogen, når du igen vil læse den.

For at starte en ny oplæsning

For at starte en ny oplæsning af den samme bog så tænd for din Victor Reader ved at trykke og holde **Tænd/Sluk**. Efter et par sekunder vil du høre titlen på bogen, et lydssignal og oplæsningen vil starte der, hvor du nåede til sidst.

For at skubbe en CD'er ud

For at skubbe en CD'er ud skal du blot trykke **Eject**. Victor Reader vil sige Eject, og efter et par sekunder vil den motoriseret mekanisme blidt skubbe CD'en ud af drevet.

Dette afslutter Kom i gang sessionen. Brugervejledningen vil starte om et øjeblik.

Brugervejledning

Om Victor Reader ClassicX

HumanWare er stolt over at kunne introducere Victor Reader ClassicX, den enkle og brugervenlige digitale talende bogafspiller.

Victor Reader ClassicX blev designet til at afspille romaner, noveller, magasiner med mere. Den gør det nemt for dig at navigere i strukturen, og hurtigt komme til den ønskede information.

Med dens funktioner, som er nemme at anvende, kan du konsultere indholdsfortegnelsen, gå til et afsnit, eller vende tilbage til et bogmærke.

Vi ønsker dig mange behagelige timer med at opdage alle mulighederne i din digitale talende bogafspiller!

Anerkendelse

HumanWare ønsker at takke Instrulog Rehab a/s for indspilningen af Victor Reader ClassicX Kom i gang og Brugervejledning.

©Copyright 2006. All rights reserved, HumanWare Canada.

Denne manual er beskyttet ved copyright tilhørende HumanWare med alle rettigheder reserveret. I henhold til copyright loven må denne manual hverken helt eller delvist kopieres uden skriftlig tilladelse fra HumanWare.

Indholdsfortegnelse

1.	OVERSIGT OVER VICTOR READER CLASSICX	7
1.1	Udpakning af afspilleren	7
1.2	Fysisk beskrivelse af Victor Reader ClassicX.....	8
1.2.1	Overside af afspilleren	8
1.2.2	Venstre side af afspilleren	8
1.2.3	Højre side af afspilleren	8
1.2.4	Forreste side af afspilleren	8
1.2.5	Bagerste side af afspilleren	8
1.3	Begrænset brugerflade.....	8
1.4	Tænd for Victor Reader	9
1.5	Batteri	9
1.6	Indsætte og udtage en CD	9
2.	GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER	10
2.1	Kontrollfunktioner	10
2.2	Start/Stop	10
2.3	Tilbagespoling og fremadspoling	10
2.4	Tastaturhjælp tilstand	10
3.	NAVIGERINGSFUNKTIONER.....	11
3.1	Navigeringsknapper.....	11
3.2	Boghylde	11
3.3	Tidshop navigeringstilstand	11
3.4	Ti sider hop.....	12
3.5	Skipbare elementer	12
4.	AVANCEREDE FUNKTIONER.....	13
4.1	Info knap.....	13
4.1.1	Mulige tilgængelige emner.....	13
4.2	Dvale tilstand:.....	13
4.3	Bogmærker.....	13
4.3.1	Indsætte bogmærker	13
4.3.2	Gå til et Bogmærke.....	13
4.3.3	Slette bogmærker	13
4.4	Fortryd/Udfør igen funktioner.....	14
5.	LYTTE TIL EN MUSIK ELLER MP3 CD	15
5.1	Funktioner	15
6.	BATTERI UDSKIFTNINGSPROCEDURE.....	16
6.1	Fjerne opbrugt batteri	16
6.2	Indsætte et nyt batteri.....	16
7.	FEJLRETNING.....	17

- 7.1 Bognavigering 17
- 7.2 Batteri og opladning 17
- 7.3 CD'er 18
- 7.4 Generelt..... 19
- 8. TEKNISKE SPECIFIKATIONER 21**

1. Oversigt over Victor Reader ClassicX

1.1 Udpakning af afspilleren

Pakken indeholder følgende ting: En Victor Reader ClassicX, et 220v kabel, en plastikpos med dokumentation og denne CD. Denne CD indeholder en kort Kom i gang session, efterfulgt af Brugervejledningen. Om nødvendigt kan du kan udskrive Brugervejledningen og Kom i Gang sessionen.

Vær venligst sikker på, at du har modtaget alle tingene, og at intet er beskadiget under forsendelsen.

Bemærk venligst, at inden du tager ictor Reader i brug første gang, bør du tilsutte afspilleren til en stikkontakt. Bemærk venligst, at du kan anvende din Victor Reader, mens batteriet lades op.

Hvis der mangler en af de ovenfor nævnte ting, så kontakt venligst HumanWare eller Instrulog Rehab a/s:

Telefon: 1 888 723-7273 (Canada & U.S.A.)

Telefon: 1 (819) 471-4818

Fax: 1 (819) 471-4828

E-mail: ca.support@humanware.com

Web: www.humanware.ca

I visse lande kan pakken også indeholde et kort, som skal udfyldes, hvis man ønsker at købe en udvidelse til den generelle garanti. Hvis du finder dette kort, og er interesseret i den udvidede garnati, så bemærk venligst, at kortet skal returneres indenfor 30 dage. Hvis du har et problem med at udfylde kortet, eller ønsker yderligere information, så kontakt venligst HumanWare.

Telefon: 1 888 723-7273 (Canada & U.S.A.)

Telefon: 1 (819) 471-4818

E-mail: ca.sales@humanware.com

1.2 Fysisk beskrivelse af Victor Reader ClassicX

1.2.1 Overside af afspilleren

Den indbyggede højttaler er placeret i det øverste venstre hjørne på oversiden.

Der er tre sæt af to op og ned knapper øverst oppe på oversiden. De er fra venstre mod højre **Tone, Lydstyrke** og **Hastighed**.

Nedenunder **Tone, Lydstyrke** og **Hastighed** kontrollerne finder du fire pileformede navigeringsknapper, **Op, Ned, Venstre** og **Højre**, som gør det nemt for dig at flytte igennem strukturen i en bog.

Til venstre for de fire navigeringsknapper halvvejs nede på afspilleren er der yderligere to knapper. Den øverste er **info** knappen. Den giver dig information om bogen, såsom antal sider, total afspilletid, resterende afspilletid og den aktuelle side. Den anden knap er **Bokmærke** knappen, som benyttes til at indsætte et bogmærke.

Nedenunder de fire Navigeringsknapper finder du: **Tilbagespoling, Start/Stop** og **Fremadspoling**. Til venstre for **Tilbagespoling** knappen og nedenunder **Bogmærke** knappen finder du **Dvale** knappen. Den er ovalt udformet og en anelse undersænket. Der er en gul LED indikator oven over den.

Til højre for **Fremadspoling** knappen og lidt op finder du yderligere to knapper. Den øverste, som er lidt forsænket, er **Tænd/Sluk** knappen. Ovenover den finder du en grøn LED indikator. Nedenunder **Tænd/Sluk** knappen finder du **Eject** knappen, som benyttes til at skubbe CD'eren ud af drevet.

1.2.2 Venstre side af afspilleren

På den venstre side af afspilleren finder du det indbyggede bærehåndtag og højttaler.

1.2.3 Højre side af afspilleren

På den højre side af afspilleren regnet bagfra mod forkanten finder du linieudgangen (identificeret med 2 nedadrettet taktile markeringer). Den anvendes for tilslutning af afspilleren til et lydanlæg. Dernæst finder du et **fjernbetjeningsstik** (identificeret med en enkelt nedadrettet taktile markering) for tilslutning af en fjernbetjeningskontakt (ekstra tilbehør) for håndfri betjening af Start/Stop og Tilbagespolingsfunktionerne. Til slut tæt ved forkanten er stikket til hovedtelefon, som også kan benyttes til eksterne højttalere. Dette stik er markeret med en opadrettet taktile markering.

1.2.4 Forreste side af afspilleren

På forsiden af afspilleren finder du sprækken til CD-ROM drevet.

1.2.5 Bagerste side af afspilleren

Du finder strømstikket på bagsiden af afspilleren lidt til venstre for midten. Det anvendes for tilslutning af afspilleren til en stikkontakt.

1.3 Begrænset brugerflade

Visse biblioteker og forhandlere har valgt at begrænse funktionaliteten af din Victor Reader ClassicX. Hvis din afspiller er sat op i begrænset tilstand, vil følgende knapper have en anden opførelse:

Såvel **Bogmærke** knappen som de fire **Navigeringspile** knapper vil være deaktiveret. Der høres ingen lydssignaler, når disse knapper trykkes.

Tryk på **Fremadspoling** og **Tilbagespoling** vil ikke aktivere **Fortryk/Gør om igen** funktionerne. Kun et lydssignal høres, når disse knapper trykkes.

Bemærkning: Hvis du har en begrænset afspiller, og ønsker at gendanne de udvidede funktioner, kontakt venligst din forhandler eller bibliotek.

1.4 Tænd for Victor Reader

For at tænde for afspilleren trykkes og holdes **Tænd/Sluk** knappen. Du vil høre et lydsignal og en velkomstmeldelse.

For at slukke for afspilleren trykkes og holdes **Tænd/Sluk** knappen igen. Du vil høre to lyd signaler, som indikerer, at afspilleren slukker.

1.5 Batteri

Batteriet er beregnet til cirka 500 opladningsforløb. Under normale betingelser vil fuldt opladede batterier kunne holde i op til 10 timer kontinuerlig afspilning af DAISY bøger. Men levetiden for batterierne kan være mindre i følgende tilfælde:

Hvis batteriet er opladet for mindre end 4 timer.

Omfattende brug af navigeringskommandoer i bogen.

Ikke DAISY CD'ere bruger mere strøm, hvorfor batteriet kun kan holde i cirka 3 timer.

Høj lydstyrke eller læsning ved høj hastighed.

Batteriet vil automatisk blive opladet, hver gang afspilleren tilsluttes 220v. Afspilleren kan benyttes under opladning. Hvis der slukkes for afspilleren, vil LED indikatoren blinke, hvis batteriet oplades. En fuld opladning vil tage op til 4 timer.

Bemærkning: Hvis din afspiller ikke er tilsluttet til lysnettet, og den er i pausetilstand i mere end 30 minutter, vil den automatisk selv slukke for at spare på batteriet.

1.6 Indsætte og udtage en CD

Sæt din CD'er i sprækken på forkanten af afspilleren. Skub dernæst forsigtigt CD'en fremad. En motoriseret mekanisme vil trække CD'en ind i drevet. Efter et par sekunder vil Victor Reader annoncere titlen på bogen, og efter et lydsignal starte oplæsningen af bogen. Hvis du ved at uheld kommer til at vende CD'en forkert, vil den blive skubbet ud efter 15 sekunder uden at have taget skade.

For at skubbe en CD'er ud skal der blot trykkes på **Eject** knappen, som findes til højre for og lidt oppe i forhold til **Fremadspoling** knappen. En motoriseret mekanisme vil derefter forsigtigt skubbe CD'en ud af drevet.

Bemærkning: **Eject** knappen fungerer kun, når der er tændt for Victor Reader.

2. Grundlæggende funktioner

2.1 Kontrolfunktioner

Hver af **Tone**, **Lydstyrke**, og **Hastighed** kontrollerne har en **Op** og **Ned** knap. Det øvre og nedre område for hver kontrol markeres med et lydsignal. Hvis der ikke afspilles nogen bog, vil Victor Reader annoncere indstillingen. For tone og hastighed er der også et lydsignal for normal eller nul positionen. Dette indikerer enten en flad toneindstilling eller den normale indstilling for hastigheden.

2.2 Start/Stop

For at starte afspilningen af en bog tryk på **Start/Stop**.

For at stoppe afspilningen af en bog tryk igen på **Start/Stop**.

Bemærkning: Tryk **Start/stop** for at bekræfte den aktuelle handling, og afspilning vil starte med det samme.

Bemærkning: Ved at trykke **Start/Stop** knappen annulleres *Dvale tilstanden*.

2.3 Tilbagespoling og fremadspoling

Disse knapper tillader dig at gå hurtigt tilbage eller fremad. Du vil høre optagelse ved højere hastighed.

Tryk og hold **Tilbagespoling** eller **Fremadspoling**, indtil du kommer til det ønskede sted. Flytningen med **Tilbagespoling** eller **Fremadspoling** vil accelerere, jo længere du holder knappen nede. For hver fem sekunder, knappen holdes nede, vil du flytte fremad eller tilbage 1 minut, 2 minutter, 5 minutter, 10 minutter, 15 minutter og så videre. Det største hop er 5 minutter. Victor Reader vil annoncere tidshoppene, og afspille et udklip ved normal hastighed imellem hvert tidshop.

2.4 Tastaturhjælp tilstand


Med *Tastaturhjælpen* kan brugeren høre funktionerne af de enkelte knapper på Victor Reader. Dette er specielt nyttigt under træning i brugen af afspilleren.

Hvis der in CD'er er i drevet: *Tastaturhjælp* tilstanden aktiveres automatisk.

Mens du er i *Tastaturhjælp tilstand*, kan du trykke en vilkårlig knap for at høre dens funktion.

3. Navigeringsfunktioner

3.1 Navigeringsknapper

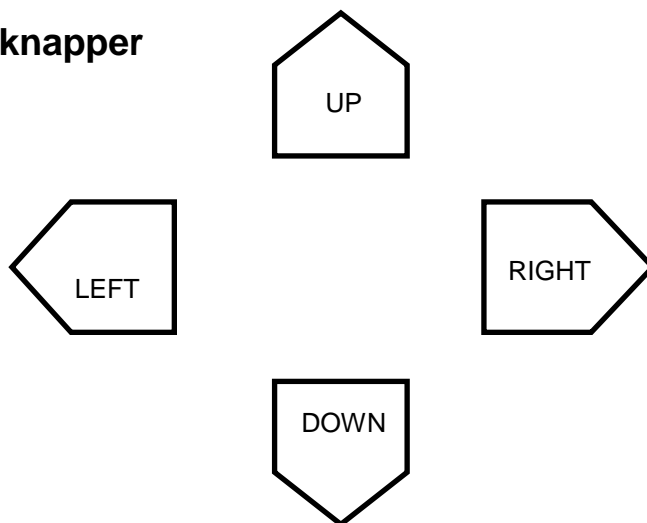

Nedenunder **Tone**, **Lydstyrke** og **Hastighed** knapperne finder du de fire Navigeringsknapper. **Op**, **Ned**, **Venstre** og **Højre**. Disse knapper gør det nemt for dig at flytte fra et bogelement til et andet for hurtigt at komme frem til den ønskede information.

Eksempler: flytning ved kapitel, afsnit, side, afsnit, bog, eller andre elementer, defineret af producenten af bogen.

Vælg først et bogelement (kapitel, side osv..). Tryk **OP** eller **NED** knappen flere gange, indtil du hører det ønskede element. Det sidst oplæste element er det valgte.

Benyt dernæst **HØJRE** knappen for at flytte fremad, eller **VENSTRE** knappen for at flytte tilbage fra et tekst element til et andet, indtil du når det ønskede bog element. Det sidst oplæste element er det valgte. Oplæsning vil starte i det valgte bogelement.

Bemærkning: Hvis afspilleren er i begrænset tilstand, vil **Navigation** knapperne være deaktiveret. Der høres ingen lydsignaler, når disse knapper trykkes.

3.2 Boghylde

For at få adgang til Boghylden trykkes **Op** eller **Ned**, indtil Victor Reader annoncerer "Boghylde". Knapperne **Venstre** og **Højre** giver dig mulighed for at flytte fra titel til titel, så du kan vælge den ønskede bog. Når du trykker disse knapper, vil Victor Reader første gang annoncerer antallet af bøger på CD'en, samt titlen på den aktuelle bog. Når du trykker Venstre og Højre igen, vil Victor Reader kun annoncerer titlen på den næste bog. Bekræft valget med Start/stop knappen. Victor Reader vil starte med at afspille den valgte bog. Bemærk, at Boghylden kun findes, hvis der er mere end en bog på CD'en.

3.3 Tidshop navigeringstilstand

Tidshop navigering er mulig i Daisy bøger. Hvis den er valgt, kan den aktiveres ved brug af **Op** og **Ned** knapperne.

Tryk **Op** eller **Ned** for at vælge navigeringsniveau, indtil Victor Reader annoncerer "Tidshop" efterfulgt af *Hopinterval*.

Tryk **Venstre** for at flytte tilbage, eller **Højre** for at flytte fremad i tidsintervallet.

3.4 Ti sider hop

Venstre og **Højre** giver dig mulighed for at flytte i 10 siders spring af gangen for hurtigt at komme til en bestemt side.,

Vælg Side navigeringselement ved at trykke **Op** eller **Ned**, indtil du hører "Side".

Tryk og hold derefter **Tilbage** eller **Fremad**. Du vil høre, Victor Reader gå fremad eller tilbage i hop på 10 sider.

Slip knappen, når du er tæt på den ønskede side, og flyt derefter en side af gangen ved at trykke henholdsvis **Tilbage** eller **Fremad**, indtil du når den ønskede side.

3.5 Skipbare elementer

Som fabriksstandard er din Victor Reader konfigureret til at afspille ekstra materiale, også kaldet skipbare elementer, såsom sidenumre, baggrundsinformation, fodnoter og producentnotater.

Ikke alle bøger er produceret med skipbare elementer, og afspilleren kan ændres til ikke at afspille skipbare elementer.

Hvis du ikke hører skipbare elementer, kan det enten betyde, at dine bøger ikke har nogle, eller at din forhandler har deaktiveret denne funktion i din Victor Reader. Kontakt venligst producenten af din bog eller forhandler for yderligere information.

4. Avancerede funktioner

4.1 Info knap

Info knappen giver direkte adgang til forskellig slags information.

Tryk og slip **Info** knappen en gang. Victor Reader vil liste alle de tilgængelige informationsemner, der findes i to sektioner: Aktuel position og Bog information

For at komme direkte til et bestemt afsnit så tryk og slip **Info** knappen, indtil du hører det ønskede afsnit.

4.1.1 Mulige tilgængelige emner

Bogtitel

Aktuelt sidenummer

Forløbet og resterende afspilletid

Antal bøger på CD.

Antal sider i den aktuelle bog, hvis muligt.

Total afspilletid for bogen.

Hvis du trykker og holder **Info** knappen, vil der yderligere blive oplyst om sprog for afspiller, om afspilleren kører på batteri eller lysnet, aktuelt batteriniveau, software version, model, antal brugernøgler og serienummer. Hvis afspilleren er sat op i begrænset tilstand, vil ordet "begrænset" blive annonceret efter model.

4.2 Dvale tilstand:

Du kan trykke **Dvale** knappen for at sætte en tid på 15 minutter, hvorefter afspilleren vil slukke. Når du trykker **Dvale**, vil du høre "Dvale 15 minutter", hvorefter afspilningen fortsætter. De 15 minutters tidsforløb er nu startet. Hvis du vil ikke vil have, at afspilleren slukker af sig selv, skal du blot trykke **Afspil/Stop** knappen. Et minut førend afspilleren selv slukker, vil den gule LED indikator oven over **Dvale** knappen starte med at blinke, og du vil høre en meddelelse, som informerer dig om, at der er 1 minut tilbage, inden afspilleren slukker.

4.3 Bogmærker

Bokmærke knappen markerer positioner i bogen, som du senere kan vende tilbage til.

4.3.1 Indsætte bogmærker

Tryk og hold **Bogmærke** knappen for at indsætte et bogmærke. Der tildeles et nummer til hvert bogmærke. En meddelelse vil bekræfte bogmærket, og informere dig om det tildelte nummer.

4.3.2 Gå til et Bogmærke

Tryk og slip **Bogmærke** knappen. Når du hører meddelelsen "Bogmærke Liste", tryk den **VENSTRE** eller **HØJRE** knap for at vælge det ønskede bogmærke. Tryk dernæst **Start/stop** for at komme til det valgte bogmærke. Du vil høre nummeret på bogmærket, og Victor Reader vil starte afspillingen.

Bemærkning: *Bogmærkelisten indeholder altid et bogmærke for start henholdsvis slut på bogen. Bogmærker sorteres efter deres position i bogen, og ikke efter deres nummer.*

4.3.3 Slette bogmærker

Tryk **Bogmærke** knappen to gange for at slette alle bogmærker i den aktuelle bog. Afspilleren vil bede dig om at bekræfte sletningen. Tryk Afspil/Stop for at bekræfte. Tryk vilkårlig anden knap for at annullere.

Bemærkning: *Bogmærker og aktuel position gemmes altid for hver bog for sig.*

4.4 Fortryd/Udfør igen funktioner

Fortryd og Udfør igen funktionerne gør det muligt for dig at annullere og genoptage din sidste flytning.

Fortryd: Tryk og slip **Tilbagespoling** knappen for at annullere den sidste flytning.

Udfør igen: Tryk og slip **Fremadspoling** knappen for at genoptage den sidst annullere flytning.

Bemærkning: Fortryd og Udfør igen funktionerne fungerer ikke overfor bogmærker. *Hvis en Fortryd og Udfør igen handling forsøges, mens der ikke er noget at fortryde eller udføre igen, eller trykkes Fremadspoling eller Tilbagespoling, og Fortryd og Udfør igen er deaktiveret, høres en ugyldigt lydssignal.*

5. Lytte til en musik eller MP3 CD

Victor Reader er ikke kun en talende bog afspiller. Du kan også afspille standard audio CD'er og MP3 CD's, så du har mulighed for at lytte til din egen musik eller kommercielle MP3 bøger.

Bemærkning: *Mapper og Filer benyttes kun for MP3 CD. Når der afspilles Musik CDDA, er det kun muligt at navigere spor for spor.*

5.1 Funktioner

Navigering: **Venstre** og **Højre** benyttes til at skifte til forrige eller næste fil i samme mappe. Hvis den aktuelle fil er den første eller sidste i en mappe, vil **Venstre** og **Højre** knapperne skifte til den sidste eller første fil i den forrige henholdsvis næste mappe.

Afspilning: Afspilning er kontinuerlig, og ved slut på den aktuelle fil vil Victor Reader skifte til den næste fil, og vil stoppe ved slutningen af den sidste fil i fillisten.

Info knappen giver direkte adgang til forskellig slags information.

Antal filer og mapper

Total afspilletid

Forløbet tid

Resterende spilletid.

Antal bogmærker

Antal af bruger autorisationsnøgler

Batteri eller 220v

6. Batteri udskiftningsprocedure

Kontakt HumanWare eller din autoriseret forhandler for at få fat i erstatningsbatterier.

6.1 Fjerne opbrugt batteri

Sæt Victor Reader foran dig.

Vend Victor Reader om på hovedet, så bagsiden af afspilleren vender frem imod dig. Afspillerens håndtag bør være til venstre.

Find dækslet til batterirummet. Tre vandrette taktile afmærkninger indikerer midten af dækslet. I den venstre side af dækslet er der en låseskrue.

Anvend en standard skruetrækker til at fjerne skruen fra dækslet. Hold afspilleren fast med den ene hånd. Tryk med den anden hånd på de tre vandrette afmærkninger, og træk dækslet hen imod dig. Åbn dækslet, og hold det på plads. Find båndet til batteriet inden i rummet. Træk forsigtigt i båndet for at frigøre batteriet fra rummet. Fjern batteriet.

6.2 Indsætte et nyt batteri

Victor Reader batterier er designet til at være fejlsikret, så de kun kan sættes ind på en bestemt måde.

For at sætte batteriet korrekt ind i rummet, skal du først placeret fladt foran dig.

Vær sikker på, at båndet peger hen imod dig. Der er en bule på den højre side af batteriet, som forhindrer det at blive sat omvendt i. Nedenunder finder du batteriets tre afdækkede terminaler. To er placeret på den venstre side af båndet, mens den tredje er til højre.

For at sætte batteriet ind i rummet vip bagsiden af batteriet nedad, skub fremad og ned. Batteriet vil blive låst på plads. Når det er på plads, skal båndet pege op, så det kan bruges til eventuelt at fjerne batteriet.

Luk dækslet til batterirummet, og skub fremad for at lukke. Skru skruen i for at sikre, at batteridækslet bliver siddende.

Bemærk, at det nye batteri skal igennem tre fuldstændige opladninger/afladninger, inden det opnår den optimale kapacitet.

7. Fejlretning

7.1 Bognavigering

1. Hvorfor annoncerer Victor Reader ikke altid de samme DAISY niveauer, når jeg trykke knapperne Op og Ned?
Op og Ned knapperne løber igennem de DAISY navigeringsniveauer, som producenten af bogen stiller til rådighed. Ikke alle DAISY bøger har samme navigeringsniveauer. For eksempel kan din bogproducent kun have indsat niveau 1 (ofte benyttet for kapitler) mærker i bogen. I dette tilfælde vil Op og Ned knapperne kun annoncere "niveau 1" og "frase". Et fraseniveau er altid inkluderet. Victor Reader kan kun navigere de niveauer, som producenten af bogen stiller til rådighed. Ofte vil Gå til side funktionen ikke fungere, da mange bøger er produceret uden DAISY sidemærker. Et frasehop er heller ikke det samme for hver bog. Nogle producenter kan inkludere en frase markering for en enkelt sætning, mens andre kan have markeret fraser som et vilkårligt tidshop. Andre igen kan have konverteret gamle kasettebåndsbøger, og indsat frase som en hel side af en kassette. For bøger med få eller ingen DAISY navigeringsmærker, vil du blive nødt til at navigere med Fremadspoling og Tilbagespoling knapperne. Tilbagespoling er til venstre for **Start/stop** knappen, og Fremadspoling er til højre for **Start/stop** knappen.
2. Hvordan får jeg at vide hvilke DAISY navigeringsniveauer, der findes i min bog?
På Victor Reader løber Op og Ned knapperne igennem de mulige navigeringsniveauer i bogen. Mange bog producenter inkluderer i afsnittet i starten af bogen en beskrivelse af hvilke DAISY niveauer, der svarer til hvilken niveauer i bogen. Check efter med din bog producent, hvis du er usikker på bogens navigeringsfunktioner.
3. Hvor hurtigt kan jeg hoppe til start eller slut på en bog?
Victor Reader har automatiske bogmærker for start og slut på bogen. Tryk **Bogmærke**, indtil du hører Victor Reader annoncere "Bogmærkeliste". Tryk derefter venstre pil, indtil du hører "start på bog". Starten på bogen er altid til venstre for det første brugerbogmærke. Tilsvarende for at komme til slut på bogen trykkes højre pil i bogmærkelisten, indtil du hører "slut på bog". Slut på bogen er altid til højre for det sidste brugerbogmærke. Hvis du ikke har sat noget bogmærke, skal du blot trykke venstre pil en gang i bogmærkelisten for at komme til start af bogen, eller trykke højre pil en gang for at komme til slut på bogen.

7.2 Batteri og opladning

1. Hvor lang tid tager det at oplade batteriet i Victor Reader, og hvor lang tid kan den spille?
Det tager op til 4 timer at lade afspilleren fuldt op. Afspilletiden for en fuld opladning er cirka 10 timer. Dette er baseret på kontinuerlig afspilning af DAISY bøger. Den forventede afspilningstid på 10 timer kan blive mindre som følge af:
Afspilleren er blevet ladet op i mindre end 4 timer.
Der udføres omfattende DAISY navigering. Dette medfører hyppigere brug af CD drevet, og forbruger således mere strøm.
Afspilning af standard (type CD-DA) musik eller bog CD'er.
Afspilning af ikke DAISY MP3 musik eller bog CDer.
Højere lydstyrke forbruger mere strøm.
Højere afspilningshastighed forbruger mere strøm.
Omgivelsestemperaturen kan påvirke levetiden for batterier.
2. Kan jeg oplade batteriet, mens jeg afspiller en bog?
Ja. Hvis du tilslutter Victor Reader til 220v, vil den altid oplade batteriet, også selvom du lytter til en bog. Bemærk, at når der er slukket for afspilleren, men den stadig er tilsluttet til 220v, vil LED indikatoren blinke, indtil batteriet er fuldt opladet,

3. Hvordan kan jeg få bekræftet, at jeg har tilsluttet AC/DC laderen korrekt?
For at finde strømstikket placeres afspilleren foran dig med håndtaget mod venstre. Strømstikket er placeret på bagsiden lidt til venstre for midten. Når du tilslutter AC/DC laderen, mens der er tændt for Victor Reader, vil du høre en kort klokkesignal. Dette bekræfter, at du er tilsluttet, og at batteriet lades op. Du kan også få bekræftet, at strømforsyningen er korrekt tilsluttet, ved at trykke INFO knappen på Victor ClassicX eller knap 0 på ClassicX +, og lytte efter meddelelsen "strømkabel tilsluttet". Når Victor ikke er tilsluttet til 220 volt, vil disse Info knapper rapportere, at Victor arbejder på batterier. Hvis du kobler Victor Reader fra 220 volt, mens der er tændt for den, vil du igen høre en kort klokkesignal, som bekræfter, at strømforsyningen er blevet afbrudt.
4. Kan jeg reducere effektiviteten af mit batteri ved at underaflade eller overoplade?
Nej. Victor Reader anvender højkvalitets NiMH (Nickel Metal Hybride) genopladelige batterier, som ikke har nogen kemisk hukommelse på samme måde som Nickel Cadmium batterier. NiMH batterierne forudsætter ikke noget specifikt ladningsforløb, og vil ikke blive mindre effektive ved underladning eller overladning.
5. Kan jeg beskadige mit batteri, hvis jeg efterlader strømkablet tilsluttet i for lang tid?
Nej. Men hvis du ikke skal bruge Victor Reader i længere tid, for eksempel mens du er på ferie, er det bedst at tage den ud af stikkontakten for at undgå beskadigelse fra spændingstransienter.
6. Kan jeg erstatte mit batteri?
Ja. Erstatningsbatterier kan rekvireres fra Humanware eller autoriserede forhandlere.
7. Hvor mange gange kan jeg genoplade mit batteri, inden det skal skiftes ud?
Batteriet er beregnet til 500 opladning/afladningsforløb. Derefter kan det stadig genoplades, men dets evne til at holde på en opladning vil formindskes. Når batteriet ikke længere kan holde på en opladning, bør det skiftes ud.
8. Hvilke forholdsregler bør tages, hvis jeg ikke regner med at skulle bruge afspilleren igennem længere tid?
Batteriet bør altid være fuldt opladet, inden afspilleren gemmes af vejen. Hvis der tale om mere end 3 måneder, anbefales det at oplade batteriet fuldt ud, og derefter fjerne det fra afspilleren. Afspilleren bør opbevares med temperaturer imellem -20 og 35 grader celsius, og fugtighedsniveauer imellem 5 og 90% uden kondensering.

7.3 CD'er

1. Hvad skal jeg gøre, hvis min CD'er blive siddende i, og ikke vil komme ud?
For det første sluk for din Victor Reader. Tænd dernæst for den igen, og tryk efterfølgende på eject knappen. Hvis Tænd/Sluk knappen ikke synes at fungere (der kommer ikke noget lydsignal, når du trykker den), så hold Tænd/Sluk knappen nede for 10 sekunder, hvorefter den slippes. Hold dernæst eject knappen nede, mens du igen trykker på Tænd/Sluk knappen. Fortsæt med at holde eject knappen nede, indtil du hører "Velkommen til Victor". Victor Reader bør derefter skubbe CD'eren ud.
2. Kan jeg skade min Victor Reader, hvis jeg sætter CD'eren omvendt i?
Nej. Victor Reader vil blot skubbe CD'eren ud.
3. Hvorfor laver min Victor Reader pivende eller kvidrende lyde med et par minutters mellemrum?
Dette er den normale lyd fra et CDRom drev, når afspilleren læser information fra CD'eren. For DAISY CD bøger vil afspilleren, efter at have indlæst CD'en, spinne ned for at spare strøm, og derefter være stille i adskillige minutter, inden den igen får behov for at læse ind. Trykkes der på navigeringsknapper, eller hoppes der til et bogmærke, vil CD'eren spinne op for at blive placeret ved den nye position.
4. Hvad skal jeg gøre, hvis min CD springer over eller stopper afspilningen?
Dårlig kvalitets CD'er eller CD'er med fingeraftryk eller ridser vil ofte ikke kunne afspilles korrekt, eller slet ikke kunne afspilles. Skub CD'en ud. Prøv at rense den med en blød bomuldsfri klud eller en CD rensklud, som kan købes i de fleste forretninger, som sælger CD'er. Prøv ikke på at bruge

papirsservietter eller renseservietter. Rens overfladen på CD'en fra midten og ud imod kanten i rette linier. Brug ikke cirkulære bevægelser. Hvis CD'eren stadig ikke vil spille, bør den undersøges for ridser. Ridsede CD'er bør returneres for ombytning.

5. Behøver jeg at rense CD drevet eller laser læselinsen?
Nej. Det drevtype, som anvendes i Victor afspillerne, behøver ingen rengøring.
6. Kan jeg anbringe Braille eller anden form for etikette på CD'eren?
Nej. Etiketten kan være skadelig for balancen af CD'eren, når den spinner ved høje hastigheder. Hvis også etiketten river sig løs inden i afspilleren, er det meget sandsynligt, at CD-ROM drevet ødelægges. Hvis du modtager en CD med en Braille eller anden form for etikette, som ikke stammer fra producenten, bør du fjerne den.
7. Hvorfor vil jeg af og til høre meddelelsen "Vent venligst", når jeg trykker en knap, selvom der er indsat en CD?
Dette kan ske, hvis du trykker en knap for hurtigt efter at have indsat CD'en, eller tændt for afspilleren. Victor Reader skal bruge lidt tid til at skanne disken, og til at indlæse DAISY navigeringsinformationen. Når du har tændt for din afspiller, eller sat en CD'er i, skal du vente med at trykke på knapperne, indtil Victor Reader har annonceret titlen på bogen.
8. Hvad betyder meddelelsen "Ingen bog på disk"?
Dette er meddelelsen, som Victor Reader sender ud, hvis den ikke genkender typen af CD'en. Victor Reader kan kun afspille DAISY, MP3 eller audio CD'er.
9. Hvad betyder meddelelsen "Audio format ikke understøttet"?
CD'en indeholder audio filer, som Victor Reader genkender, men filerne er formateret på en måde, som er inkompatibel med Victor Reader softwaren. Du bør henlede HumanWare's tekniske support om dette.
10. Kan jeg beskadige min Victor Reader ved at afspille en ridset CD'er?
Nej. CD'ens læselinse kommer ikke i kontakt med CD'ens overflade, så den vil ikke blive beskadiget, hvis CD'en er ridset. Den vil heller ikke være udsat for slid fra gentagne afspilninger på samme måde som en kasettebåndafspiller.

7.4 Generelt

1. Hvad skal jeg gøre, hvis Tænd/Sluk knappen ikke fungerer?
Hvis du ikke hører noget lydssignal, når du trykker Tænd/Sluk knappen, så vær først sikker på, at afspilleren er tilsluttet 220 volt. Hvis Tænd/Sluk knappen stadig ikke fungerer, så tryk og hold den nede for 10 sekunder. Dette vil nulstille afspilleren. Tryk derefter knappen igen, og Victor Reader bør give et lydssignal og starte normalt.
2. Kan softwaren i Victor Reader opdateres?
Ja. Når HumanWare opgraderer Victor Reader softwaren, vil brugeren selv være i stand til at installere den nye software ved blot at indsætte en speciel opgraderings CD'er i afspilleren, som derefter automatisk opdaterer den interne software. Opgraderings CD'eren kan fåes fra HumanWare Customer support, hentes direkte fra HumanWare webside, eller fra en forhandler, som yder denne support.
3. Bør jeg slette bogmærker for at spare på hukommelsen?
Nej, Victor Reader kan gemme mere en 1500 bogmærker, fordelt over mange bøger. Selvom du overskrider dette store antal, vil Victor Reader blot genbruge de bogmærker, som er benyttet mindst. Så du behøver ikke at slette bogmærker, du ikke har brug for.
4. Hvorfor fungerer lydstyrkekontrollen ikke overfor mine hovedtelefoner?
Vær sikker på, at hovertelefonerne er tilsluttet stikket for hovedtelefon, og ikke linieudgangen. Lydstyrkekontrollen fungerer kun overfor stikket til hovedtelefon. Dette er stikket nærmest mod dig på højre side af afspilleren. Linieudgangen er for tilslutning af anden enhed såsom et lydanlæg eller båndoptager.

5. Hvad er formålet med fjernstyringsstikket?

Fjernstyringsstikket er et 2.5 millimeter stik, placeret på den højre side af afspilleren. Det er placeret på den højre side af afspilleren. Det er det andet stik, regnet fra bagsiden, og det er markeret med en enkel fremhævet linie. Man kan tilslutte en trykknop (normalt en fodkontakt) til stikket, og med denne fjernstyre start/stop og tilbagespoling. Hver gang, der trykkes på kontakten, skiftes start/stop funktionen. Tilbagespolingen aktiveres ved at trykke og holde kontakten.

Du kan bruge mange forskellige slags trykknapper til at betjene afspillerens fjernstyringsfunktioner. Den eneste forudsætning er, at det skal være en normalt åben kontakt. Det betyder, at det elektriske kredsløb kun lukkes, når der trykkes på knappen.

8. Tekniske specifikationer

- Dimensioner: 23.7 X 20.9 X 5.4 cm (9.3 X 8.2 X 2.1 in.)
- Vægt : 1.1 kg (2.42lbs) med batteri
- DAISY understøttede formater: DAISY 2.0 og 2.0.2
DAISY NISO Z39.86 2002
- Batteritype: Genopladeligt NiMH batteri. 7.2 volt 1800 mAh
- Ladetid: 4 timer
- Batteritid: 10 timer for kontinuerlig afspilning af DAISY MP3 bog
- Miljøbetingelser: Driftstemperatur: 10-40 grader celsius
Opbevaringstemperatur: -20-35 grader celsius
Fugtighed (uden kondensering) 5-90%
- Strømforsyning: Den medfølgende AC/DC lader opfylder kun kravene for det land, hvor den blev solgt. Check din forhandler for andre AC/DC ladere til brug for andre lande.
- Kodningsalgoritmer: PCM, ADPCM, MPEG, MP3, OGG (Ogg Vorbis)
- Strømsstik 2.5 mm (indvendig)/ 5.5 mm (udvendig)
- Linieudgang, stik til hovedtelefon 3.5 mm
- Fjernstyringsstik 2,5 mm

Bemærk, at fjernstyringsstikket er beregnet til brug for en trykknapsenhed, hvor det elektriske kredsløb sluttes, når kontakten trykkes.

For yderligere information kontakt venligst HumanWare:

Hovedkontor
445, du Parc Industriel
Longueuil (Quebec)
Canada J4H 3V7

Service
1030, René-Lévesque Blvd.
Drummondville, Québec
Canada J2C 5W4

Telefon: 1 (819) 471-4818
Gratis nummer (Canada & USA): 1 (888) 723-7273
Fax: 1 (819) 471-4828
E-mail:
Web: www.humanware.ca